



Artikelnummer. 56-754-K1



Auto Sure Float™

Artikelnummer

56-739 / 56-740 / 56-741 / 56-742 / 56-745 / 56-746 / 56-747


- Brukarvikt 0 - 260 kg
- Madrassen är kliniskt dokumenterad t om sårkategori 4.

Mått: 203 x 81/86/105/120 x 25 cm
(med bottenmadrass i skum)

203 x 81/86/105/120 x 20 cm



8.0 Kontrollpanel

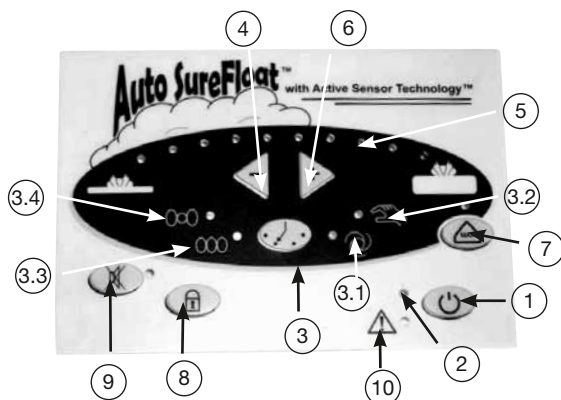

1. PÅ/STANDBY kopplar kontrollenheten från läge På till Standbyläge och vice versa.

2. NÄTSTRÖMSINDIKATOR – LED indikerar att kontrollenheten är strömförsörjd.

3. LÄGESVAL Tryck upprepade gånger för att förflytta dig mellan de olika lägesvalen: Auto/Kontinuerlig fyllnadsnivå, Auto/Alternande Tryck (AT), Manuell/Kontinuerlig fyllnadsnivå och Manuell/Alternande Tryck (AT)

3.1 LÄGE AUTO (sensorkabeln till madrass M1000S måste vara ansluten till kontrollenheten). Madrassen fylls automatiskt till optimal fyllnadsnivå alltefter den information som förmedlas av de aktiva sensorerna i madrassen. Lysindikatorn närmast symbolen tänds när läge Auto är aktivt.

Anmärkning: Om madrassens sensor-kabel ansluts utan att läge Auto är inställt, kopplar kontrollenheten omedelbart om till läge Auto. Om madrassens sensorkabel lossnar från kontrollenheten när läge Auto är aktiverat, utlöses ett ljudalarm.

3.2 LÄGE MANUELL Madrassens fyllnadsnivå bestäms av användaren genom att variera komfortinställningen (-, +). Lysindikatorn närmast symbolen tänds när läge Manuell är aktiverat.

3.3 STATISKT LÄGE KONTINUERLIG FYLLNADSNIVÅ Alla celler i madrassen fylls likformigt när denna ikon är tänd.

3.4 DYNAMISKT LÄGE (Alternande Tryck). Närallgande celler inuti madrassen fylls och töms växelvis i detta läge. Lysindikatorn närmast symbolen är tänd medan läge AT är aktiverat. Anm. Läge AT inaktiveras temporärt vid läge maximal fyllnadsnivå.

4. MJUK (-) Minskar madrassens fyllnadsnivå endast om kontrollenheten är i läge Manuell. Ett tryck minskar inställningen med en komfortnivå. Om man håller kvar knappen i intryckt läge, ändras inställningen snabbt.

5. KOMFORTKONTROLLINDIKATORN visar det aktuella börvärdet för fyllnadsnivån.

6. HÅRD (+) ökar madrassens fyllnadsnivå endast om kontrollenheten är i läge Manuell. Ett tryck ökar inställningen med en komfortnivå (~2, 5 mmHg). Om man håller kvar knappen i intryckt läge, ändras inställningen snabbt.

7. OMVÅRDNADSLÄGE väljer / väljer bort läge Maximal fyllnadsnivå (maximal madrasshårdhet). Lysindikatorn bredvid knappen blinkar, när läge Maximal fyllnadsnivå är aktiverat. Efter 30 minuter bryts läge maximal fyllnadsnivå.

8. Med LÅS-knappen aktiverar/inaktiverar man läge låsning. Håll knappen intryckt i tre sekunder för att aktivera / inaktivera låsningen. Lysindikatorn bredvid knappen lyser när låsningen är aktiverad. När låsningen är aktiverad fungerar endast knappen MAXIMAL FYLLNADSNIVÅ. Alla andra knappar är temporärt inaktiverade.

9. Med ALARMLJUD AV stängs alarmljudet av permanent.

10. NÄTFELSINDIKATORN blinkar när nätspänningen i nätledningen bryts medan kontrollenheten är igång. För att undvika att nätfelsindikatorn blinkar oavsiktligt, rekommenderar vi att enheten ställs i läge STANDBY innan strömmen till försörjningen över nätet bryts.

10.2 Användning med madrass M1000S (madrass med Active Sensor Technology™)

Läge: Auto – Kontinuerlig fyllnadsnivå

1. Automatisk drift aktiveras automatiskt när man trycker på knappen "PÅ" (under förutsättning att sensorkabeln till madrass M1000S är ansluten till kontrollenheten). Lysindikatorn bredvid symbolen AUTO tänds när läge Auto är aktiverat.
2. För att välja drift med kontinuerlig fyllnadsnivå trycker man på lägesväljaren tills lysindikatorn bredvid symbolerna för kontinuerlig fyllnadsnivå och Auto tänds.
3. När läge Auto är aktiverat krävs ingen inmatning av uppgifter från personalen för att få optimal fyllnadsnivå för patienten. De aktiva sensorerna i madrassen under patientens pelvis känner tillsammans med kontrollenheten automatiskt av den optimala fyllnadsnivån för patienten, så att patienten har full tryckavlastning.
4. För att undvika att inställningarna ändras oavsiktligt, håll knappen LÅS intryckt i ca 3 sekunder.

Läge Auto – AT

1. Om också behandling med alternerande luftflöde önskas, håll lägesvalsknappen intryckt tills lysindikatorn bredvid symbolerna för Auto och AT tänds.
2. I läge Auto – AT pumpas varannan cell i madrassen omväxlande upp och töms med 2,5 minuters intervall. Efter varje 2,5 minuters intervall kontrollerar systemet luftmängden (genom den automatiska sensorn i madrassen) och ställer in komfortnivån alltefter behov, innan AT-läget åter kopplas in.

11.0 Omvårdnadsläge - Förflyttning av patienter i och ur sängen

1. Om patienten skall skötas om eller förflyttas, tryck på knappen MAXIMAL FYLLNADSNIVÅ. Madrassen pumpas nu upp maximalt så att en fast, stabil anliggningsyta bildas (och läge Alternerande Tryck och Auto avslutas). Genom att åter trycka på MAXIMAL FYLLNADSNIVÅ avslutas detta läge och madrassen återgår till tidigare valda inställningar.
2. I läge Maximal Fyllnadsnivå blinkar lysindikatorn bredvid knappen MAXIMAL FYLLNADSNIVÅ, så att vårdpersonalen påminns om att systemet befinner sig i detta läge. Efter ca 30 minuter avslutar kontrollenheten läge Maximal Fyllnadsnivå och återgår automatiskt till tidigare valda inställningar.

Transport av patienter

3. Vid transport av patient inaktivera läge låsning om detta används. Stäng av pumpen och drag ur kontakten ur väggen. Madrassen är nu klar för transport och håller luften 6 timmar.

12.0 CPR (Hjärt- lungräddning)

Så här töms madrassen inför en hjärtmassage:

1. Bryt de dubbla snabbkopplingarna mellan madrasslangen och kontrollenheten. Det tar ca 15-20 sekunder att tömma madrassen.
2. Börja med hjärt-lungräddningen.

OBS! Läs igenom bruksanvisningen (56-754-A1) innan produkten tas i bruk.

13.0 Rengöring, skötsel och lagring av systemet

13.1 Rengöring

VARNING

Innan du börjar rengöringen av kontrollenheten, dra ur nätkabeln ur vägguttaget. Komponenterna i systemet får ej upphetas eller autoklaveras med ånga.

1. Kontrollenhet, nätkabel, slangar och madrass rengörs med tvål, vatten och en ren duk. Använd inga rengöringsmedel som innehåller slipmedel för rengöring av madrassen. Torrdamma med en ren, torr duk. Anmärkning: Blod och andra kroppsvätskor måste nogga avlägsnas från alla ytor, innan desinfektionsmedel används.
2. För rengöring av de yttre ytorna på kontrollenheten, slangarna och madrassen användes ett desinfektionsmedel som är godkänt av de svenska hälsovårdsmyndigheterna. Följ tillverkarens instruktioner.
3. Torka av madrassen med en ren, torr duk för att avlägsna överflödigt desinfektionsmedel.
4. Madrassens överdrag kan av hygieniska skäl tvättas vid behov eller när det skall användas för en annan patient. Överdraget kan vid behov tvättas i 90°C. Efter avslutad tvättning tas överdragen omedelbart ut ur maskinen för att säkerställa att allt överflödigt vatten har sugits upp. Överdraget kan torktumlas. Förvissa dig om att överdraget är helt torrt innan användning.
5. Om enstaka luftceller i madrassen blir smutsiga, rengör och desinficera dem som beskrivet ovan eller ersätt helt enkelt de smutsiga luftcellerna med rena luftceller. En enstaka luftcell kan bytas ut medan patienten förblir liggande på madrassen. De luftceller, som inte innehåller några aktiva sensorer, kan tvättas. Leverantören tillhandahåller en låsplugg, som förhindrar att vatten tränger in under tvättningen (art.nr. 30287).
6. Nylonöverdraget runt skummadrassen, (vissa modeller) samt madrassramen rengörs med mild tvållösning eller desinfektionsmedel. Delarna kan också vid behov maskintvättas i 60° C. Förvissa dig om att delarna är torra innan användning.

VARNING

De vinröda luftcellerna med Active Sensor Technology som finns i madrass M1000S får inte tvättas. De kan skadas. Om en eller flera celler med Active Sensor Technology skadas måste hela satsen bytas ut.

Leverantör:

GATE REHAB DEVELOPMENT AB

Isberga • 333 91 Smålandsstenar • Sweden

Tel 0371 318 00 • Fax 0371 318 01

Mail: info@gaterd.se • www.gaterd.se