



Amfibi™

Hygienstol

Amfibi Double 56-203DB




Säkerhet

Läs bruksanvisningen noga före användning.

- Stå aldrig på AmfiBi
- Patientansvarig/Ordnator bär ansvaret för att produkten är lämplig för dess användare.
- Batteriskötsel - ta för vana att alltid placera batteriet i laddaren över natten eller då stolen ej kommer att användas på ett par dagar. Batteriet kan aldrig överladdas men däremot skadas om det inte regelbundet laddas.
- Användarens personvikt bör vara max 150 kg.
- Vid reglering av höjd/lutning - se till att inga kroppsdelar kan komma i kläm.
- Iaktta försiktighet vid lutande mark och passage över trösklar eller liknande.
- Stå aldrig på FOTSTÖDEN - tipprisk föreligger!
- Laddning av batteri ska ALLTID göras i torrt utrymme - ej i våtrum eller liknande.
- Stolen får aldrig användas UTAN batteri då fukt kan komma in och skada styrbox/elektronik.
- Stol får ALDRIG användas UNDER vatten (i bassäng eller liknande).

Manövrering av stol

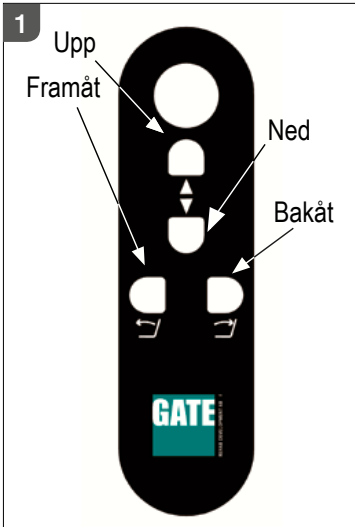

Vid höjning och sänkning av sits används knapparna "upp" och "ned." Tiltfunktionen regleras med knapparna "framåt" och "bakåt".




Manövrering kan ske med patient i stol – se till att ingen klämrisk föreligger.

Ljudsignaler under drift (varnings-symbol/obs symbol);

- 3 korta summertoner innebär att batteriet måste laddas (stol kan bara köras nedåt).
- 1 kort summerton innebär att batteriet är tomt.

Fotstöden / Hälband

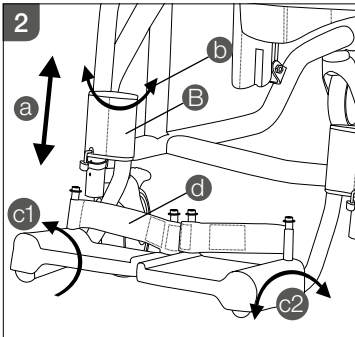


a) Fotstödet kan regleras i höjd genom att clips tas ur (se figur 3) och fotstöd flyttas till önskad höjd (var noga med att återplacera clips)

b) Fotstödet kan svängas åt sidan genom att fatta fotstöd vid pil B – lyft uppåt/sväng.

c) Fotstödsplattan kan vridas upp (c1) och/eller vinklas (c2) enligt önskemål.

d) Hälbandets längd regleras genom kardborrelåsningen på hälbandets baksida.

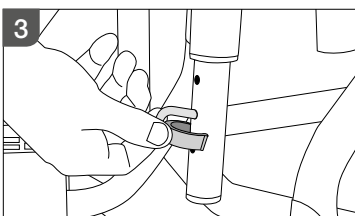

Tippskydd - bakåt



AmfiBi Double är utrustad med ett tippskydd som alltid ska vara nedfällt/aktiverat då stolen tippas bakåt. Detta säkerställer att stolen inte tippas bakåt vid ogynnsamt lastläge.

Tippskyddet består av två stycken tipprör som i uppfällt läge låses med magnetkraft mot ställdon/tilt.



Tippskyddet faller ned då stolen tippas bakåt. Kontrollera att tipprören är låsta i nedfällt läge med snäpp-låsningen.


Vid uppresning – lossa rören genom snäpplåset, lyft upp röret och fäst med magnetlås.



Låsning av hjul

Samtliga hjul är låsbara. Låsning görs genom att med foten trycka bromsen (grön) mot hjulet. Frigör bromsen genom att med foten återställa bromsen.



Uppsamlingskäril

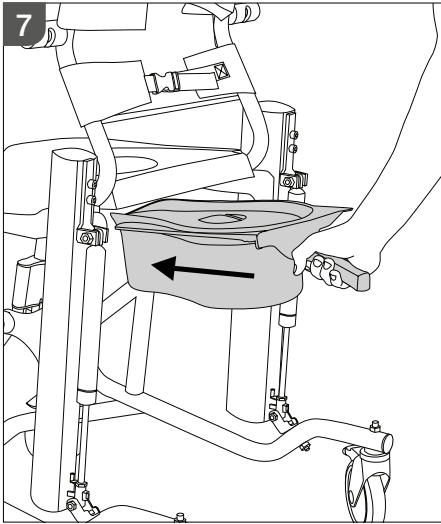

Uppsamlingskäril skjuts in bakifrån mellan sits och trådgejder enligt bild 7.

Var noga med att uppsamlingskärilet skjuts ovanpå trådgejderna. Var även noga med att kärilet hamnar på rätt ställe i förhållande till uttag/sits.

Montering/justering av nackstöd

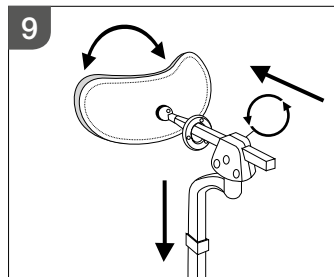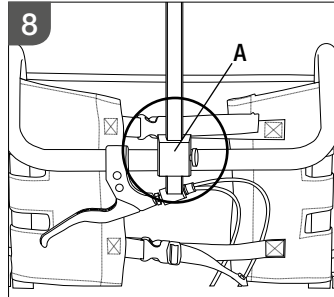


Nackstödet monteras i hylsa (A) på på stolens körhandtag (Se figur 8)

Nackstödet har många frihetsgrader (se bild 9) och kan ställas vertikalt, horisontellt och radiellt – allt för att hitta optimal komfort för patienten.

Montering/Borttagning av sits




Armstödslåsning

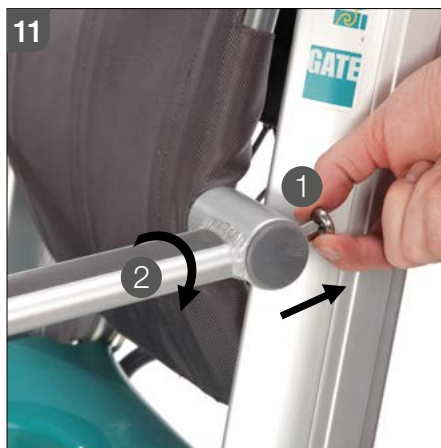

Armstödet är låst i nedfällt läge. För att lyfta armstödet - drag ut sprint (1) och lyft armstödet (2).

Körning av stol

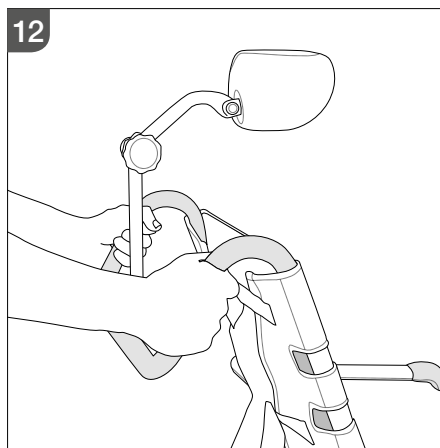

Vi rekommenderar att körhandtaget används då stolen ska köras (med/utan patient). Körhandtaget är utformat så att stolen på enklaste sätt och med minsta kraft ska kunna föras framåt/svängas (se fig 12).

Kalibrering av Ställdon

Om strömmen bryts till kontrollbox under drift eller i direkt anslutning till drift (inom 5 sekunder efter det att stol har manövrerats) kan det innebära att UPP/NED- eller FRAMÅT/BAKÅT-funktionen slutar att fungera. Man behöver då göra en återställning/kalibrering av ställdonens lägessensorer.

Kalibrering UPP/NED;

1. Tryck in fjärrkontrollens båda knappar UPP/NED – samtidigt i cirka 10 sekunder tills pipsignal hörs. Släpp knapparna.
2. Tryck in NED-knappen och kör stolen till sitt minläge. Släpp knappen.
3. Stolens UPP/NED funktion är nu kalibrerad och kan användas som vanligt.

Kalibrering FRAMÅT/BAKÅT;

1. Tryck in fjärrkontrollens båda knappar FRAMÅT/BAKÅT - samtidigt i cirka 10 sekunder tills pipsignal hörs. Släpp knapparna.
2. Tryck in BAKÅT-knappen och kör stolen så långt bakåt som möjligt. Släpp knappen.
3. Stolens FRAMÅT/BAKÅT funktion är nu kalibrerad och kan användas som vanligt.

Insättning/uttag av batteri

13



Batteriet sitter normalt i styrboxen (placerad i väska bakom ryggband) och hålls där på plats med magnetkraft.

Uttag av batteri: Vrid batteriet 90 grader - ta ut.

Insättning: För in batteriet i styrboxen. Magnetkraft låser batteriet samt kvitterar att allt är OK med en pipsignal.



Varningssignal då batteriet sätts i;

- 2 långa summertoner innebär att kalibrering måste göras (se ovan)
- 5 korta summertoner innebär att batteriet måste laddas innan drift.

Laddning av batteriet

Batteri tas ur styrboxen och placeras i medföljande laddare. Laddaren ansluts till nät ("röd" lampa lyser - ansluten till nät, "grön lampa" blinkar - laddning av batteri pågår). När batteri är färdigladdat lyser "grön" lampa. OBS! Laddning av batteri ska alltid göras i torrt utrymme. Stolen får EJ användas då batteriet är borttaget - vatten kan då tränga in i styrbox och skada denna.



Batteriskötsel - ta för vana att alltid ta ur batteriet ur kontrollbox och placera batteriet i laddaren då stolen ej används (gäller särskilt över natten eller om inte stolen ska användas på ett par dagar). Kontrollboxen förbrukar alltid en mindre mängd ström och batteriet riskerar därför att allvarigt skadas om det inte regelbundet laddas.

Garanti

Vi lämnar 2 års garanti på ev. fabriksfel (gäller ej förslitningsdetaljer).

Stolen är tillverkad av rostfria rör/pulverlackerade samt aluminium. Utsatta detaljer som ej har lackerats är gjorda av aluminium eller rostfritt stål. Var noga med att kontrollera så att produkten känns stabil/glappfri – inga lösa skruvförband får finnas. Skadade eller defekta delar bör bytas så snart det är möjligt.

Rengöring

- Stolen rengörs genom avtorkning med vanligt förekommande rengöringsmedel (EJ baserat på Pentanol) alternativt tvättmaskin/autoklav (max 85 grader). Var noga med att styrbox/batteri tas bort innan maskintvätt görs.
- Ryggband torkas av med rengöringsmedel (ej uttorkande) alternativt tvättas i maskin 85 grader (se även instruktion på ryggbandet).
- Sits - kan tas bort och rengöras separat alternativt tvättas i maskin/autoklav (max 85 grader).

Kontrollera särskilt (minst 1 gång/år)

1. Armstöd - så att glidskydd/handlovsskydd är hela och sitter fast.
2. Elställodon/höj-sänk + Elställodon/lutning; Kontrollera funktion med fjärrkontroll samt att elställodens infästningar ej glappar.
3. Sitsen/mjuksitsen - är hel och utan sprickor. Inga vassa kanter får finnas.
4. Fotstödsplattor - är hela och möjliga att justera på avsett sätt. Kontrollera att clips är hela och ordentligt fastsatta. Hälbanden ska finnas bakpå varje fotstödsplatta.
5. Hjul - ska ej rulla trögt eller sitta löst. Kontrollera också att broms fungerar.
6. Nackstödet - kontrollera att nackstödet kan justeras till önskad position. Vid behov - dra åt skruvförband.
7. Ryggbandet ska vara helt och ej har några hål eller andra skador på remmar/låsfästen.



 CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.



DIN PARTNER I VÅRDEN

Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 0371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | S-330 21 Reftele
info@gaterd.se | www.gaterd.se



GATE COLLECTION