

GATE

REHAB DEVELOPMENT AB TM



Bure Rise & Go

Gåbord med uppresning

Nytt unikt
koncept!

Bure Rise & Go™

Gåbord med uppresning

Bure Rise & GO är ett kostnadseffektivt gåbord som förfinats med en patenterad uppresningsfunktion. Tack vare den elektriska uppresningen är Bure Rise & Go ett gånghjälpmedel, ett uppresningshjälpmedel och ett förflyttningshjälpmedel i en och samma produkt.

Nyhet – nu finns Rise & Go även med eldriven breddning av bottenstativet. Den flexibla breddningen i kombination med en lägre höjd över bottenstativet ger en ökad flexibilitet oavsett patientsituation på sjukhus eller i hemmet.



Steg 1

Selen sätts på plats över ryggslut och stuss. Remmarna justeras och underbensstöden ställs in i rätt position.



Steg 2

Patienten håller händerna på handtagen och den eldrivna uppresningen påbörjas. Med hjälp av den unika selen och gåbordets vertikala lyftriktning följer patienten ett naturligt rörelsemönster.



Steg 3

Efter uppresningen vinklas underbensstöden bort och patienten kan direkt börja gå med gåbordet som stöd. Alternativt placerar patienten fötterna på en ståplatta och är efter uppresningen redo att förflyttas.

Unik uppresningshjälp

Bure Rise & Go sparar både tid, plats och pengar. Här får man ett gånghjälpmedel, ett uppresningshjälpmedel och ett förflyttningshjälpmedel i en och samma produkt vilket gör konceptet mycket kostnadseffektivt.

Bure Rise & Go skapar möjlighet till en bättre arbetsergonomi för den som vårdar, tränar och arbetar tillsammans med brukaren. Tack vare den intelligenta uppresningshjälpmedlet skapas en trygg, säker och naturlig uppresning som inte sliter på vårdpersonalens rygg.

Produkten består av ett gåbord med tillhörande sele och fästsättningsremmar. Selen finns i olika storlekar (S, M, L)

och är delad baktill vilket underlättar vid exempelvis toalettbesök.

Vid uppresning utnyttjas elmotorns lyftkraft och infästningen i gåbordet gör att avstånd mellan brukare och gåbord minskar i takt med att gåbordet höjs upp till stående. Sammantaget leder Bure Rise & Go till en minskad arbetsbelastning och är en investering i personalens hälsa och brukarens rehabilitering.

Nyhet – nu finns Rise & Go även med eldriven breddning av bottenstativet. Den flexibla breddningen i kombination med en lägre höjd över bottenstativet ger en ökad flexibilitet oavsett patientsituation på sjukhus eller i hemmet.

Rise & Go DB

Stabilt

Gåbordet har anatomiska dynor som avlastar axlar, armar och nacke. Istället flyttas fokus till större muskelgrupper som ben- och bröstmuskulatur. På så vis förbättras stabiliteten och bordet blir lättare att styra.

Smidig steglös justering

Med eldriven höjning och sänkning blir det smidigt att förinställa gåbordet till rätt höjd. När patienten står på plats kan höjden sedan finjusteras steglöst så att den blir bekväm, ger rätt stöd och är optimal för gång.

Eldriven uppresning

Bure Rise & Go är ett unikt hjälpmedel vid uppresning av patient eller brukare. Personalens belastning minskar och därmed också risken för förslitningsskador.

Tål vatten

Alla eldetaljer på Bure Rise & Go har kapslingsklass IP 65 och kan därmed användas även i våta utrymmen.

Låg höjd

Den låga höjden över golvet minimerar problem med att komma intill brukaren exempelvis vid sängsittande.

Öppen och förstärkt konstruktion

Den öppna konstruktionen ger samma stabilitet men större manöverutrymme. Patienten behöver inte känna sig instängd och det blir lättare för dig som hjälper till vid uppresning eller påklädning. Bure Rise & Go är dessutom förstärkt och förlängd för extra stabilitet vid uppresning.

Lättåtkomlig handkontroll

Handkontrollen är placerad så att vårdarens alternativt brukarens båda händer enkelt kan nå den.

Ergonomiska handtag

Ergonomiskt utformade handtag som kan justeras steglöst i alla riktningar för bästa individuella anpassning. Viktigt inte minst för strokepatienter som på det här sättet kan nå sin "normala" handställning.

Utfällbara armstöd

De anatomiskt utformade armstöden på Bure Rise & Go är utfällbara för att brukaren på ett enkelt sätt ska nå handtagen vid uppresning.

Hållbart

Gåbordet har konstruerats för att hålla länge. Exempelvis finns det ett extra förstärkningsband runt armstödsdynorna för att förhindra att dess spricker vid påkörning från sidan.

Unik uppresningssele

Uppresningssele är utformad för att komma så långt ner på stussen som möjligt. Detta ger ett optimalt stöd vilket medför en naturlig uppresningsrörelse.

Underbensstöd vid uppresning

Bure Rise & Go är utrustad med underbensstöd som bidrar till bättre uppresning. Underbensstöden är reglerbara i höjdlöd och skjuts enkelt undan för större benutrymme.

Låsbara hjul

Bure Rise & Go har fyra individuellt låsbara hjul som standard.

Bottenstativ med elbredning

Elbredningen gör det enkelt att skjuta gåbordet ända fram till brukaren, oberoende av rullstolsbredd, sängkonstruktion eller stolsbredd. Detta underlättar också för personalen vid uppresning. Med benen i det yttre läget blir gåbordet extra stabilt och kan med fördel användas av brukaren själv. Detta underlättar också för patienter som behöver extra gångutrymme.

Samtliga Gåbord kan beställas med 75, 100 eller 125mm hjul – anges vid beställning. (Om inget annat anges så avser höjdmått nedan produkter med 125mm hjul). Nedan visas exempel på möjliga artikelkombinationer.

Tekniska specifikationer

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC. | Testad och godkänd enligt EN-11199-3/ 2005

Art. Nr.		Bredd, yttermått	Max brukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd/Innermått
56-309/75	Bure Rise & Go DB med elektrisk benspridning, 75mm	66-106 cm	150 kg	101 cm	90-130 cm	34-67 cm
56-309	Bure Rise & Go DB med elektrisk benspridning	66-106 cm	150 kg	101 cm	95-135 cm	34-67 cm
56-333-DB	Ståplatta kort		150 kg			
56-383-DB	Ståplatta lång		150 kg			
56-384-MULTI-S/M/L/XL	Uppresningssele Multi	-	150 kg	-	-	-
56-388-KIT	Gåträningskit till Uppresningssele Multi	-	150 kg	-	-	-

* S=95-105cm, M=105-120cm, L=110-140cm, XL=130-160cm

Rise & Go

Stabil

Gåbordet har anatomiska dynor som avlastar axlar, armar och nacke. Istället flyttas fokus till större muskelgrupper som ben och bröstmuskulatur. På så vis förbättras stabiliteten och bordet blir lättare att styra.

Lättåtkomlig handkontroll

Handkontrollen är placerad så att vårdarens alternativt brukarens båda händer enkelt kan nå den.

Ergonomiska handtag

Ergonomiskt utformade handtag som kan justeras steglöst i alla riktningar för bästa individuella anpassning. Viktigt inte minst för strokepatienter som på det här sättet kan nå sin "normala" handställning.

Utfällbara armstöd

De anatomiskt utformade armstöden på Bure Rise & Go är utfällbara för att brukaren på ett enkelt sätt ska nå handtagen vid uppresning.

Hållbart

Gåbordet har konstruerats för att hålla länge. Exempelvis finns det ett extra förstärkningsband rund armstödsdynorna för att förhindra att dess spricker vid påkörning från sidan.

Smidig steglös justering

Med eldriven höjning och sänkning blir det smidigt att förinställa gåbordet till rätt höjd. När patienten står på plats kan höjden sedan finjusteras steglöst så att den blir bekväm, ger rätt stöd och är optimal för gång.

Eldriven uppresning

Bure Rise & Go är ett unikt hjälpmedel vid uppresning av patient eller brukare. Personalens belastning minskas och därmed också risken för förslitningsskador.

Tål vatten

Alla eldetaljer på Bure Rise & Go har kapslingsklass IP 65 och kan därmed användas även i våta utrymmen.

Tramprör för stabilitet

Som en extra säkerhet har Bure Rise & Go ett tramprör som säkerställer att gåbordet står still vid uppresning.

Öppen och förstärkt konstruktion

Den öppna konstruktionen ger samma stabilitet men större manöverutrymme. Patienten behöver inte känna sig instängd och det blir lättare för dig som hjälper till vid uppresning eller påklädning. Bure Rise & Go är dessutom förstärkt och förlängd för extra stabilitet vid uppresning.

Underbensstöd vid uppresning

Bure Rise & Go är utrustad med underbensstöd som bidrar till bättre uppresning. Underbensstöden är reglerbara i höjdlöd och skjuts enkelt undan för större benutrymme.

Unik uppresningssele

Uppresningssele är utformad för att komma så långt ner på stussen som möjligt. Detta ger ett optimalt stöd vilket medför en naturlig uppresningsrörelse.

Låsbara hjul

Bure Rise & Go har fyra individuellt låsbara hjul som standard.

Handbroms och riktningsspärrade hjul

Som tillbehör finns det en- eller tvåhandsbroms som placeras så att brukaren själv kan nå den från sin gåposition. Handbromsen verkar på bakhjulen och riktningsspärrade hjul underlättar för brukaren att hålla rätt kurs vid gång.

Samtliga Gåbord kan beställas med 75, 100 eller 125mm hjul – anges vid beställning. (Om inget annat anges så avser höjdmått nedan produkter med 125mm hjul). Nedan visas exempel på möjliga artikelkombinationer.

Tekniska specifikationer

CE CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC. | Testad och godkänd enligt EN-11199-3/ 2005

Art. Nr.		Bredd, yttermått	Max brukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd/Innermått
56-316	Bure Rise & Go Gåbord	77 cm	150 kg	92 cm	97-137 cm	34-67 cm
56-316/75	Bure Rise & Go Gåbord, 75mm	77 cm	150 kg	92 cm	92-132 cm	34-67 cm
56-333-STD	Ståplatta kort	-	150 kg	-	-	-
56-383-STD	Ståplatta lång	-	150 kg	-	-	-
56-384-MULTI-S/M/L/XL	Uppresningssele Multi	-	150 kg	-	-	-
56-388-KIT	Gåträningskit till Uppresningssele Multi	-	150 kg	-	-	-

* S=95-105cm, M=105-120cm, L=110-140cm, XL=130-160cm

Dropphållare med fäste

Skapar goda möjligheter för patienten att röra sig fritt i rummet, på avdelningen eller i hemmet. Levereras tillsammans med fäste.

Handkontroll

GATE PLUS innebär ett antal extra funktioner såsom multipla hastigheter och service/batteri-indikator i handkontrollen.

PU-dynor

PU-dynor kan väljas vid order alternativt efterbeställas. Dessa dynor har inga perforeringar eller smutsamlande kanter. Ett bra alternativ för de som ställer höga krav på Hygiene Management.

Mjukkorg med fäste

Korg med fäste har plats för det allra viktigaste.



Trampor

Fungerar som en motvikt och ger extra stabilitet och säkerhet då gåbordet ska användas vid uppresning. Standard på Rise & GO. Kan ej användas på bord med breddningsbart bottenstativ.

Riktningsspärret hjul

125 mm
100 mm
75 mm

Handbromstillsats, en eller två bromsar

Kompletterar gåbordet med handbroms så att brukaren vid gångträning själv kan bromsa bordets rörelse. Riktningsspärrade hjul ingår för extra säkerhet/hjälp. Enhandsbroms finns både som vänster och höger.

Då Handbromstillsats är monterad så ökar bottenstativets bredd med +2cm.



Styrning av höj/sänk samt breddning i handtagen

Vi erbjuder styrning med tryckknapp alternativt vippströmbrytare. Samtliga funktioner kan manövreras på detta sätt och detta tillbehör kan också eftermonteras och vid behov också användas i kombination med ordinarie handkontroll.

Ställbart sidostöd

Förhindrar att armarna glider av armstödsdynorna. Justeras steglöst längs med gåbordets sida vilket stabiliserar gången ytterligare. Sidostödet finns även i PU-utförande.

Syrgastubshållare med fäste

Gör att patienten inte längre behöver vara låst vid sängen.

Underbensstöd

Underbensstödet underlättar mobilisering/uppresning.

Ståplatta


Ståplattan är ett utmärkt komplement i de fall då man önskar att använda gåbordet för mobilisering/förflyttning. Finns i en kort och lång version.

Hälband till ståplatta

Handbromstillsats

Hjul med broms

125mm
100mm
75mm

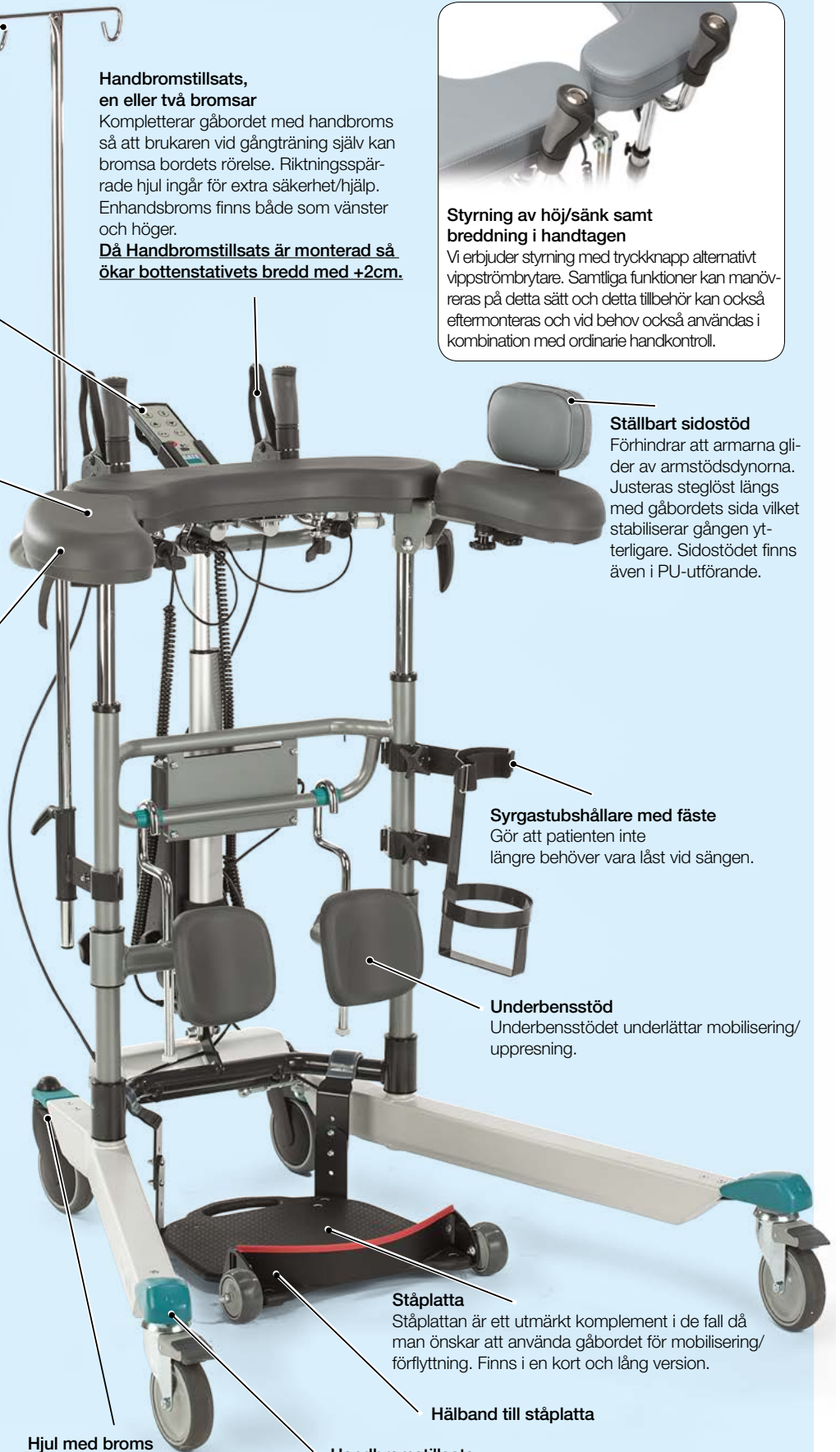

Tillbehör



Droppstång inkl. fäste



Sidostöd/Sidostöd PU



Ståplatta kort/lång



Ståplatta kort/lång, länkhjul (SW)



Handbromstillsats DB



Handbromstillsats standard



Hjul med broms 75, 100, 125mm



Hjul med riktningsspärr 75, 100, 125mm



Gåtränings Kit Multi Med Gåträningskit MULTI så gör du din uppresningssele till en gåträningssele



Mjukorg



Tubhållare inkl. fäste




Armstödsdynor/underbensstöd PU



Körhandtag



Hälband/ståplatta

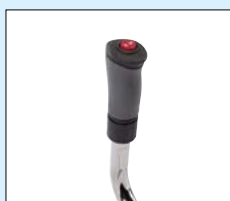

Styrning/handtag - vippströmbutare



Styrning/handtag - tryckströmbutare



Tippskydd - bakåt



Trampör



Handkontroll PLUS

Du vet väl att...

TIPS!



Nya Bure Rise & Go DB har en lägre markfri-gång än tidigare vilket gör det betydligt enklare att komma in under säng och därigenom komma nära brukaren. Särskilt låg blir Bure Rise & Go DB i kombination med 75mm hjul.



Om du väljer ett gåbord med elektriskt ställbar breddning så väljer du också en ökad flexibilitet. Du kommer nära patienten oavsett bredd på rullstol, stol. Läggs också märke till att ståplattan i de flesta fall också får plats mellan rullstolens främre hjul.



Ståplattan är ett utmärkt tillbehör i de fall man önskar utnyttja gåbordet för mobilisering/uppresning eller förflyttning. Ståplattan är tillräckligt smal för att kunna användas med de flesta rullstolar.

Lathund

TILLBEHÖR

Benämning	Art#	Bure Rise & Go	Bure Rise & Go DB
Armstödsdynor/Knästödsdyna PU, Rise & Go (DB)	57-372	X	X
Droppställning inkl. hållare	56-338	X	X
Gåträningskit Multi, Rise & Go (DB)	56-388-KT	X	X
Hjul			
Hjul med broms 75mm	56-387	X	X
Hjul med broms 100mm	56-358	X	X
Hjul med broms 125mm	56-361	X	X
Hjul med riktningsspår 75mm	57-043	X	X
Hjul med riktningsspår 100mm	56-355	X	X
Hjul med riktningsspår 125mm	56-359	X	X
Hälband/ståplatta	58-328-1	X	X
Körhandtag	57-391	X	X
Manuell broms			
Manuell broms, 2 hands, Rise & Go	56-339-3-0	X	
Manuell broms, 1 hands, Rise & Go	56-339-3-1	X	
Manuell broms, 2 hands, Rise & Go DB	56-339-4-0		X
Manuell broms, 1 hands, Rise & Go DB	56-339-4-1		X
Mjukkgorg inkl. fäste	56-389	X	X
PLUS			
Handkontroll PLUS inkl. hållare, Rise & Go	58-375-1	X	
Handkontroll PLUS inkl. hållare, DB/Rise & Go DB	58-375-2		X
Sidostöd	56-337	X	X
Sidostöd, PU	56-337-PU	X	X
Styrning/Handtag			
Knapptillsats FK, Upp/Ned, Normal hastighet, ett htg*	58-387-1	X	X
Knapptillsats FK, Upp/Ned, Hög hastighet, ett htg*	58-387-2	X	X
Knapptillsats FK, Breddning, ett htg*	58-387-3		X
Knapptillsats TK, Upp/Ned, Normal hastighet, två htg*	58-388-1	X	X
Knapptillsats TK, Upp/Ned Hög hastighet, två htg*	58-388-2	X	X
Knapptillsats TK, Breddning, två htg*	58-388-3		X
Y-kabel för knapptillsats - en per Gäbord*	57-022-1	X	X
Y-kabel för användning av Handkontroll tillsammans med Knapptillsats	57-022-3	X	X
Ståplattor***			
Ståplatta kort, STD	56-333-STD, 56-333/SW-STD	X	
Ståplatta kort, DB	56-333-DB, 56-333/SW-DB		X
Ståplatta lång, STD	56-383-STD, 56-383/SW-STD	X	
Ståplatta lång, DB	56-383-DB, 56-383/SW-DB		X
Tippskydd bakåt, Std/Low/Ortho/Space**	57-387	X	
Tramprör, Std/Rise & Go	56-331-1	X	
Tubhållare inkl. fäste	56-336	X	X
Uppresningssele MULTI med fästband (S, M, L, XL), Rise & Go (DB)	56-384-MULTI-S/ML/XL	X	X

*Vid eftermontering krävs utrustning för att borra hål i stativ.

**Kan ej monteras med manuell broms.

*** /SW är variant med länkhjul.

Bure Rise & Go™

Gåbord med uppresning

- **BURE RISE & GO** är en komplett lösning som sparar både tid, plats och pengar vilket blir mycket kostnadseffektivt
- **TRYGG OCH SÄKER** uppresning och förflyttning innebär en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen
- **DEN UNIKA** uppresningshjälpen ger en naturlig uppresning där patienten själv kan vara aktiv
- **BURE RISE & GO** är en patenterad och skyddad design av GATE Rehab Development AB
- **GÅBORDET KAN** användas med ståplatta vilket underlättar förflyttningar
- **SELEN TVÄTTAS** i 60° och tack vare den delade utformningen är den enkel och smidig att bära även vid t ex toalettbesök
- **BURE RISE & GO** är utrustad med en elektrisk, smidig och steglös höjjustering
- **NYHET** – nu finns Rise & Go även med eldriven breddning av bottenstativet för flexibilitet oavsett brukarmiljö.



Ståplattan kan med fördel användas vid förflyttning!

Se även filmen om Bure Rise & Go!
www.gaterd.se

Gåträningskit/Multi

(Tillbehör)

Gåträningskit/Multi är ett tillbehör som används för ökad säkerhet vid gåträning i produkt Bure Rise & Go. Produktens båda ljumskstroppar och fastsättningskrokar minimerar risker om brukare drabbas av yrsel eller motsvarande.



GATE

WE DO BETTER.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 0371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | SE-333 75 Reftele
info@gaterd.se | www.gaterd.se



GATE COLLECTION