



Bure Rise & Go™

Gåbord med uppresning

Kära användare

Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord Rise & Go. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du använder gåbordet samt hur det underhålls. Vi rekommenderar att denna bruksanvisning läses noga innan hjälpmedlet används.


Vi på GATE Rehab Development önskar dig lycka till med din produkt. Hör gärna av dig till oss om du har några kommentarer, frågor eller synpunkter.

Kort beskrivning av Bure Rise & Go:

- Bure Rise & Go är ett traditionellt elmanövrerat gåbord som förfinats med en uppreningsfunktion. Förutom att användas som ett gåbord förenklar det vardagen och alla dess förflyttningar tack vare den intelligenta uppreningsfunktionen.
- Bure Rise & Go kan användas av alla dem som normalt använder ett gåbord. Brukaren kan vara aktiv då uppreningsfunktionen används.
- Produkten består av ett gåbord med tillhörande sele och fastsättningsremmar. Selen finns i olika storlekar (S, M, L, XL) och är delad baktill vilket gör att man kan vara fastspänd i selen men ändå göra toalettbesök. Selen fästs i fastsättningsremmarna (2 st – en på varje sida) som i sin tur fästs i gåbordet.
- Vid upprensning så utnyttjas elmotorns lyftkraft och den intelligenta infästningen i gåbordet gör att avstånd mellan brukare och gåbord minskas i takt med att gåbordet höjs – patient kommer upp till stående.
- Gåbordet kan med fördel användas med ståplatta vilket underlättar rena förflyttningar.




Metodik vid uppresning med Bure Rise & Go

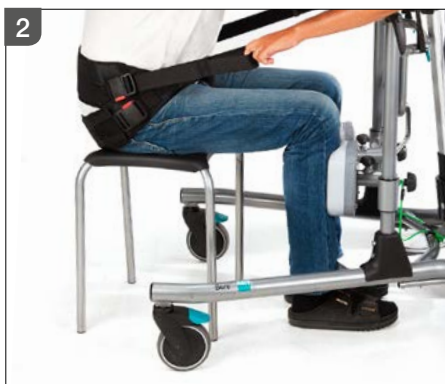

Då uppresning/förflyttning av en patient alltid medför en risk rekommenderar vi att man alltid är 2 personer som hjälper brukaren vid en uppresning/förflyttning.

1. Placera selen så långt ned som möjligt över höft och stuss. Den breda/övre delen runt höften och den smala/nedre delen runt stussen. Fäst selen med kardborren samt dra åt med det steglöst justerbara säkerhetsbandet. Notera att selens undre del som fästs runt stussen kan öppnas vid behov ex. vid toalettbesök.
2. Placera brukarens ben i 90° vinkel, fötterna i golvet eller på ståplattan. Ställ in underbensstöden mot brukarens underben, tänk på att undvika tryck mot knäskål och knäskålssena. (För justering av underbensstöd - se sidan 5).
3. Trä de båda fastsättningsremmarna genom gåbordets stativ och genom de gröna låsbrickorna. Var noga med att remmarna träs igenom låsbrickorna fullständigt. Kontrollera särskilt att remmar ej är slitna/trasiga.
4. Koppla ihop uppresningsdelen med fastsättningsremmarna (som fästs i gåbordet), spänn dessa med dragöglan - remmarna ska var sträckta på båda sidor.

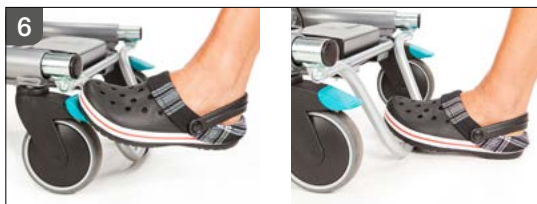

5. Fäll underarmsstöden ut åt sidan. Brukaren ska nu hålla i handtagen UTAN stöd för underarmarna.
6. Lås gåbordets hjul genom att aktivera minst två av de tre gröna bromspedalerna. Fäll ned trampör framför bordet.
7. Utför uppresningen, kontrollera att selen drar lika mycket på båda sidor. Om inte, justera genast. Vid uppresningen skall en vårdgivare finnas framför brukaren med sin tyngd på trampörret samt hålla ögonkontakt med brukaren. Den andra vårdgivaren kan finnas bredvid brukaren.
8. I de flesta fall kommer brukaren inte till helt upprätt stående, uppmana till självständig slutsträckning eller hjälp brukaren genom att dra i selens justerbara band så att slutsträckning uppnås.
9. Sänk gåbordet till individuellt anpassad höjd, för tillbaka underarmsstöden så att brukaren får stöd. Om inte ståplatta används, för undan underbensstöden för ökat gångutrymme (se Justering underbensstöd, sidan 5). För ökad säkerhet så kan selen behållas på - exempelvis vid förflyttning på ståplatta.

Höjning/Sänkning av stativ



Önskad höjd justeras med hjälp av fjärrkontrollen Pil <UPP> resp. Pil <NED>

Justering av handtag



Handtagen justeras till önskad position genom att: Ratt lossas, handtagen justeras, ratt låses.

Tramprör



Använd alltid trampröret då lyft av patient ska göras. En fot ska alltid blockera det nedfällda trampröret - detta för att undvika att gåbordet roterar bakåt.

Höger- och vänsterjustering av armstödsplattor




För optimalt stöd kan armstödsplattorna justeras i sidled: Hela armen vrids utåt/inåt och blockeras med vredet.

Låsning av hjul/ Upplåsning av hjul



Bure Rise & Go är utrustad med tre låsningsbara/bromsade hjul (grön pedalbroms) samt ett riktningsspärrat hjul (svart pedalbroms) Hjulen låses genom att fotbromsen trycks nedåt och aktiveras. Vid upplåsning pressas den uppstickande delen av bromsen ned. Låsning med grön pedal: rullning och svängning ej möjlig. Låsning med svart pedal: hjul rullar som vanligt men kan ej svängas.

Justering av Underbensstöd

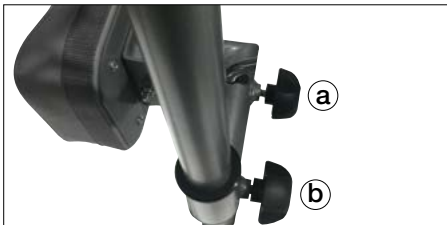

a - ratt för justering i höjddled
b - ratt för låsning av underbensstöd i framåtsvängt läge (då det ej används).

Kopplingschema styrbox



För att hantera kopplingar enligt nedan så måste styrboxens täcklock tas bort. Detta görs med hjälp av en skruvmejsel eller liknande - se särskild märkning på styrboxen.

1. Uttag för ställdon - höj/sänk. OBS! Var noga med att kontakter ansluts till rätt uttag eftersom detta annars kan skada ställdon.
2. Uttag för fjärrkontroll.
3. Uttag för batterikontakt.
4. Uttag för stickpropp (OBS! För att IP-klassning ska gälla så ska stickpropp ALLTID vara ansluten till styrbox).

Laddning av batteri

- Stickpropp ansluts till 230V – vägguttag. Laddning påbörjas automatiskt och LED på batteriet blinkar grönt.
- Innan första användning - se till att batteriet är fulladdat. Det tar ca 25 h att ladda batteriet fullt.
- Om produkten ställs undan pga att den inte ska användas under en längre tid (mer än 3 veckor) så rekommenderar vi att batterikontakt lossas från styrboxen. På detta sätt elimineras risken att batteriet förstörs då styrboxen förbrukar en liten mängd ström även då bordet inte används.

LED på styrbox och batteri

- Styrbox – lyser grönt då spänning finns från batteri/nätuttag.
- Batteri:
 - Vid laddning lyser LED med blinkande grönt sken
 - Då batteriet är fulladdat så lyser LED med fast grönt sken
 - Då batteri är i normalläge/drift så blinkar LED med grönt sken med OREGELBUNDET intervall enligt - 0,5 sek tänd, 4 sek släckt.
 - Då batteri behöver laddas (kvarvarande kapacitet <25%) blinkar LED med orange/rött sken med REGELBUNDET intervall enligt - 0,5 sek tänd, 4 sek släckt.

OBS! Batteriet har en inbyggd funktion som automatiskt stänger av batteriet då kvarvarande kapacitet <20%. LED är då släckt. Batteriet måste nu laddas fullt innan elektroniken på nytt kan användas.

Underhåll (Rekommenderas minst 1 gång/år.)

Kontrollera att/om

Åtgärd

Allmänt

Bordet känns stumt/glappfritt.
Bordet inte skramlar vid manövrering.
Bordet är plant och alla hjul är i kontakt med underlaget.
Bordet ej är smutsigt.

Rengör med ljum såpalösning/alkolbaserat rengöringsmedel (ej petroleumprodukter)

Armstödsplattor

Armstödsplattor är hela och rena.
Breddning armstödsplattor fungerar.

Rengör och byt om skador finns.
Byt låsrott.

Handtag

Grepp ej är skadade/smutsiga.

Rengör med ljum såpalösning (ej petroleumprodukter).
Byt handtagsgrepp.
Komplettera ev. låsrotar/brickor

Handtagsinställning fungerar.

Batteri

Kontrollera att laddkabel är ansluten till styrbox

Komplettera med ny laddkabel, denna ska alltid vara ansluten till styrbox (IP65klassning).
Anslut ev. komplettera med ny fjärrkontroll.

Kontrollera att fjärrkontrollen är ansluten till styrbox

Se kopplingschema i Teknisk manual.

Kontrollera att kopplingar är gjorda enligt kopplingschema

Kontrollera att batteri, ställdon och styrbox ej sitter/hänger löst.

Skruva åt, komplettera ev. med nya skruvförband.

Höjdjustering

Höjning och sänkning fungerar.
Bordet känns stabilt vid maxinställning.
Inget glapp finns mellan vertikalt stativ och bottenstativ.
Klämmor för höjdjustering låser.
Infästning av elställdon ska vara glappfri.

Byt ev. styrhylsa (i stativ) alt. ändpropp (i kromat rör).

Reglering av höjd med fjärrkontroll fungerar. Elställdonet ska löpa mjukt och med konstant hastighet.

Skruva åt låsskruva
Byt klämmor
Skruva åt resp. infästningsförband, komplettera med skruv/låsmutter.
Kontrollera så att batteri/fjärrkontroll/ställdon är rätt kopplad enligt schema. Ladda batteriet. Kontakta kundtjänst.

Stativdelar

Inga mekaniska skador finns.
Inga skrapmärken finns.
Ändskydd/bottenstativ sitter på.

Om skador finns - konsultera GATEs kundtjänst.
Komplettera med bättringsfärg.
Komplettera med nya ändskydd.

Hjul/broms

Hjul rullar lätt /slitbanan ej är skadad

Rengör alt. byt hjul (OBS! hjulen låses alltid i bottenstativ med kemisk låsning alt låsmutter. Hjulen är kapslade och vi rekommenderar inte att de demonteras. Byt istället ut hela hjulpaketet.

Hjulen är hårt åtdragna i bottenstativ.

Skruva åt hjulbult - komplettera med låsmutter alt. Kemisk låsning (modellberoende)

Blockeringsbroms fungerar på alla hjul.

Byt hjulpaket.

Handbroms fungerar.

Justera broms alt komplettera med nya hjul.

Sele
Spännen, sömmar och kardborrelåsningar (velcro) är hela/intakta.



Byt sele. Finns i storlek S, M, L, XL

Låsbleck i bord (gröna) är hela.

Byt låsbleck.

Generella skötselråd

- Torka av gåbord och armstödsplattor vid behov - använd tvållösning/alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.
- Produkten kan rengöras i tvättunnel eller motsvarande då elektronik är IP65-klassad. Dock, produkten är ej rostfri vilket gör att rengöring i maskin kan förkorta produktens livslängd.
- Byt ut trasiga delar omedelbart – skall göras av kunnig personal.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

Tekniska specifikationer

Mått anges för bord med 125 mm hjul.

Art. Nr.	Produkt Bredd	Max brukarvikt	Längd	Höjd	Vikt	Armstöd/ Innermått
56-316	77 cm	150 kg	89 cm	110-152 cm	25 kg	34-65 cm

 CE märkt enligt MDD 93/42/EEC

SE Patent No. SE534997. Patentansökan gjord i flera länder



GATE
REHAB DEVELOPMENT AB

Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 0371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | S-330 21 Reftele
info@gaterd.se | www.gaterd.se





GATE COLLECTION

DIN PARTNER I VÅRDEN