



BureTM

Gåbord

Kära Användare

Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du använder Bure Gåbord samt hur det underhålls.

Vi på GATE Rehab Development önskar dig lycka till med din produkt. Hör gärna av dig till oss om du har några kommentarer, frågor eller synpunkter.
Ring 0371 – 318 00.


Höjning och sänkning av stativ

Önskad höjd justeras med hjälp av fjärrkontrollen
Pil <UPP> resp.
Pil <NED>




Justering av handtag

Handtagen justeras till önskad position genom att:
Ratt lossas,
handtagen justeras,
ratt låses.

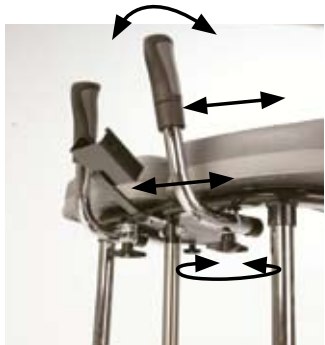

Höger- och vänsterjustering av armstödsplattor

För optimalt stöd kan armstödsplattorna justeras i sidled: Ratt lossas, armstödsplattans läge justeras, ratt låses.

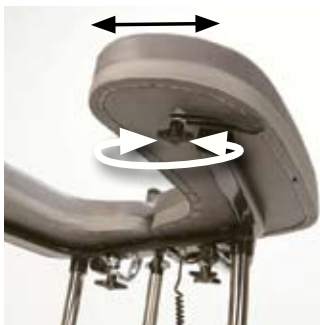

Låsning av hjul

Hjulen låses genom att fotbromsen trycks nedåt och aktiveras.




Upplåsning av hjul

Pressa ned den uppstickande delen av bromsen för att lossa bromsen.



Kopplingschema styrbox

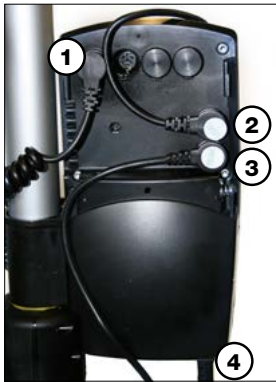

För att hantera kopplingar enligt nedan så måste styrboxens täcklock tas bort. Detta görs med hjälp av en skruvmejsel eller liknande - se särskild märkning på styrboxen.

1. Uttag för ställdon - höj/sänk. OBS! Var noga med att kontakter ansluts till rätt uttag eftersom detta annars kan skada ställdon.
2. Uttag för fjärrkontroll.
3. Uttag för batterikontakt.
4. Uttag för stickpropp (OBS! För att IP-klassning ska gälla så ska stickpropp ALLTID vara ansluten till styrbox).

Kopplingschema styrbox

- Stickpropp ansluts till 230V – vägguttag. Laddning påbörjas automatiskt och LED på batteriet blinkar grönt.
- Innan första användning - se till att batteriet är fulladdat. Det tar ca 25 h att ladda batteriet fullt.
- Om produkten ställs undan pga att den inte ska användas under en längre tid (mer än 3 veckor) så rekommenderar vi att batterikontakt lossas från styrboxen. På detta sätt elimineras risken att batteriet förstörs då styrboxen förbrukar en liten mängd ström även då bordet inte används.

LED på styrbox och batteri

- Styrbox – lyser grönt då spänning finns från batteri/nätuttag.
- Batteri:
 - Vid laddning lyser LED med blinkande grönt sken
 - Då batteriet är fulladdat så lyser LED med fast grönt sken
 - Då batteri är i normalläge/drift så blinkar LED med grönt sken med OREGELBUNDET intervall enligt - 0,5 sek tänd, 4 sek släckt.
 - Då batteri behöver laddas (kvarvarande kapacitet <25%) blinkar LED med orange/rött sken med REGELBUNDET intervall enligt - 0,5 sek tänd, 4 sek släckt.

OBS! Batteriet har en inbyggd funktion som automatiskt stänger av batteriet då kvarvarande kapacitet <20%. LED är då släckt. Batteriet måste nu laddas fullt innan elektroniken på nytt kan användas.

Underhåll

Rekommenderas minst 1 gång/år.

Kontrollera att/om	Åtgärd
Allmänt Bordet känns stumt/glappfritt. Bordet inte skramlar vid manövrering. Bordet är plant och alla hjul är i kontakt med underlaget. Bordet ej är smutsigt.	Rengör med ljum såpalösning/ alkolbaserat rengöringsmedel (ej petroleumprodukter)
Armstödsplattor Armstödsplattor är hela och rena. Breddning armstödsplattor fungerar.	Rengör och byt om skador finns. Komplettera ev. låsrattar/brickor
Handtag Grepp ej är skadade/smutsiga. Handtagsinställning fungerar.	Rengör med ljum såpalösning (ej petroleumprodukter). Byt handtagsgrepp. Komplettera ev. låsrattar/brickor
Batteri Kontrollera att laddkabel är ansluten till styrbox Kontrollera att fjärrkontrollen är ansluten till styrbox Kontrollera att kopplingar är gjorda enligt kopplingsschema Kontrollera att batteri, ställdon och styrbox ej sitter/hänger löst.	Komplettera med ny laddkabel, denna ska alltid vara ansluten till styrbox (IP65klassning). Anslut ev. komplettera med ny fjärrkontroll. Se kopplingschema i Teknisk manual. Skruva åt, komplettera ev. med nya skruvförband.
Höjjustering Höjning och sänkning fungerar. Bordet känns stabilt vid maxinställning. Inget glapp finns mellan vertikalt stativ och bottenstativ. Klämmor för höjjustering låser. Infästning av elställdon ska vara glappfri. Reglering av höjd med fjärrkontroll- fungerar. Elställdonet ska löpa mjukt och med konstant hastighet.	Byt ev. styrhylsa (i stativ) alt. ändpropp (i kromat rör). Skruva åt låsskruvar Byt klämmor Skruva åt resp. infästningsförband, komplettera med skruv/låsmutter. Kontrollera så att batteri/fjärrkontroll/ ställdon är rätt kopplad enligt schema. Ladda batteriet. Kontakta kundtjänst.
Stativdelar Inga mekaniska skador finns. Inga skrapmärken finns. Ändskydd/bottenstaiv sitter på. Hjul/broms Hjul rullar lätt /slibanan ej är skadad Hjulen är hårt åtdragna i bottenstativ. Blockeringsbroms fungerar på alla hjul. Handbroms fungerar.	Om skador finns - konsultera GATES kundtjänst. Komplettera med bättringsfärg. Komplettera med nya ändskydd. Rengör alt. byt hjul (OBS! hjulen låses alltid i bottenstativ med kemisk låsning alt låsmutter. Hjulen är kapslade och vi rekommenderar inte att de demonteras. Byt istället ut hela hjulpaketet. Skruva åt hjulbult - komplettera med låsmutter alt. Kemisk låsning (modellberoende) Byt hjulpaket. Justera broms alt komplettera med nya hjul.

Generella skötselråd

- Torka av gåbord och armstödsplattor vid behov - använd tvålösning/alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.
- Produkten kan rengöras i tvättunnel eller motsvarande då elektronik är IP65-klassad. Dock, produkten är ej rostfri vilket gör att rengöring i maskin kan förkorta produktens livslängd.
- Byt ut trasiga delar omedelbart – skall göras av kunnig personal.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

Tekniska specifikationer

Mått anges för bord med 125 mm hjul.

Standard EL	S EL
Art. Nr. 56-312T	Art. Nr. 56-302T
Bredd 78 cm	Bredd 66 cm
Max brukarvikt 150 kg	Max brukarvikt 150 kg
Längd 80 cm	Längd 79 cm
Höjd 91-131 cm	Höjd 91-131 cm
Armstöd/Innermått 25-50 cm	Armstöd/Innermått 30-45 cm



CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.
Testad och godkänd enligt EN-11199-3/2005



Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 0371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | S-330 21 Reftele
info@gaterd.se | www.gaterd.se



DIN PARTNER I VÅRDEN

GATE COLLECTION