

Gate duschstol Amfibi med Bodypoint Hygienbälte.


Information om Hygienbältena:

http://www.hea.se/sites/hea2.xelera.biz/files/hygienbalte_14_04.pdf

Tre olika monteringar:

1. Runt bröstet 2. Över höften

Dessa finns beskrivna på www.hea.se , Positionering och skydd, bröstselar

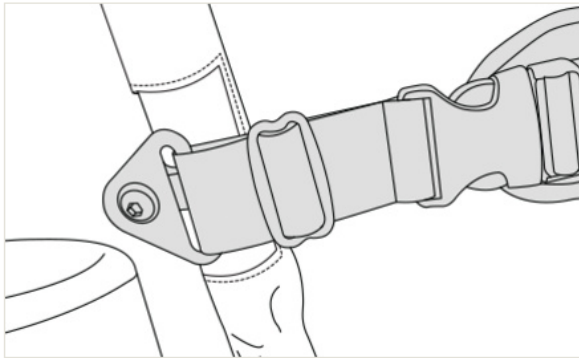


Montering av Hygienbälte runt bröstet

Fäst rörklämman av aluminium (Art.nr HW310-25) i ryggstöret där klädseln är utskuren.



HW310-25

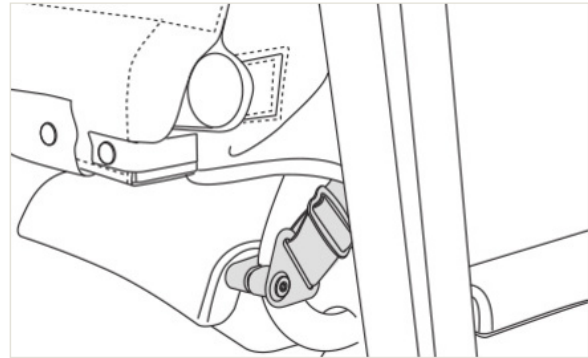

Montering av Hygienbälte över höften

Fäst hygienbältet i ryggstöret med Rörklämma av aluminium (Art.nr HW310-25)



HW310-25

Den tredje monteringen som kommer att läggas till ovanstående två.

3. Över låren. Fäste ungefär på sitsens mitt. Distanshylsa erfordras.





För monteringen behövs :

HW310-25 Rörklämma aluminium, för 25 m rör 2 styck

HW310-25L-SS Hylsa gängad, 25 mm lång, rostfritt stål 2 styck