



FRT 4900

Golwåg

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD.....	3
ALLMÄN INFORMATION.....	3
SÄKERHETSINSTRUKTIONER	3
MILJÖ	4
RENGÖRING.....	4
UNDERHÅLL.....	4
VÄGNING	4
GARANTI	5
KASSERING AV VÅG	5
TEKNISK SPECIFIKATION.....	6
DISPLAYSYMBOLER	6
KNAPPFUNKTIONER.....	7
BMI- & TARE-FUNKTIONER	8
LÅG BATTERINIVÅ & ADAPTERANSLUTNING	9
MONTERINGSINSTRUKTIONER	9
MONTERING AV FRT200M MANUELL LÄNGDMÄTARE	10
MONTERING AV FRT200D DIGITAL LÄNGDMÄTARE.....	10
FELMEDDELANDEN	11

FÖRORD

Tack för att du valt en produkt från Gate Rehab Development AB. Vågens alla funktioner är utformade för enkel och smidig användning. Om du har några frågor eller får problem kontakta Gate Rehab Development AB eller besök vår hemsida på www.gaterd.se

ALLMÄN INFORMATION

Vi rekommenderar att du använder vågen på ett jämnt och hårt underlag. Användning på mjuka underlag, som mattor eller liknande, kan ge felaktiga mätresultat.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Innan användning läs noga igenom bruksanvisningen, den innehåller VIKTIG information om installation, användning och underhåll av vågen.

Tillverkaren ansvarar inte för skador till följd av felaktig användning, beakta nedan anvisningar:

- Vid användning av elektriska komponenter, vid höga säkerhetskrav, följ alltid gällande säkerhetsföreskrifter.
- Vid felaktig installation gäller ej garantin.
- Kontrollera att vågenhetens voltstyrka stämmer överens med strömförsörjningen i eluttaget.
- Vågen är avsedd för inomhusbruk.
- Beakta föreskriven omgivningstemperatur för användning.

Vid problem kontakta:

Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2
330 21 Reftele

MILJÖ

- Alla batterier måste källsorteras och/eller lämnas till en återvinningscentral. De får INTE kastas tillsammans med hushållsavfall eller i papperskorgen.
- Den optimala brukstemperaturen är mellan +5° C och +35° C och ger längst batteritid.

RENGÖRING

- Stäng ALLTID av vågen och dra ur elsladden innan rengöring.
- Vid rengöring, använd sprit på en ren fuktig trasa.
- Använd aldrig stora mängder vatten vid rengöring, det kan orsaka skador på vågens elektronik.
- Använd aldrig frätande vätskor eller högtryckstvätt vid rengöring.

UNDERHÅLL

Vågen behöver inte kontrolleras och underhållas dagligen. Vi rekommenderar däremot regelbundna kontroller av vågens mätriktighet. Frekvensen av dessa kontroller bör ske i förhållande till graden av användning och vågens skick. Om felaktigheter uppstår kontakta Gate Rehab Development AB.

VÄGNING

Innan du läser de detaljerade instruktionerna för användning av vågens alla inbyggda funktioner, vänligen läs nedan riktlinjer:

- Displayen ska alltid visa 0.0 före användning, om den inte gör det tryck på ZERO-knappen.
- Vågen är utformad för att ange när stabil vikt uppnåtts, indikatorn blinkar 2 gånger när stabilt viktvärde uppmätts och vikten kan läsas av.

GARANTI

- Om fel eller defekter uppstår på vågen är Gate Rehab Development AB ansvariga för att åtgärda dessa eller ersätta vågen.
- Reservdelar är Gate Rehab Development AB:s egendom.
- Garantitiden är 2 år från inköpsdatum. Din faktura/kvitto gäller som garantibevis.
- Om din våg är i behov av service kontakta Gate Rehab Development AB.
Kompensation utgår inte för skador som uppstått på grund av:
 - Felaktig eller olämplig användning.
 - Felaktig installation utförd av er själv eller tredje part.
 - Felaktig användning av kemikalier, elektriska störningar eller fukt i vågenheten.
- Garantin gäller ej om vågen tas i bruk i olämpligt omgivningsklimat eller vid andra faktorer som kraftigt påverkar kvaliteten för vågens komponenter.


KASSERING AV VÅG

- Produkten måste vid kassering källsorteras och/eller lämnas till en återvinningscentral, den får inte kastas tillsammans med hushållsavfall eller övrigt avfall.
- För ytterligare information och hänvisningar vänligen kontakta Gate Rehab Development AB.

TEKNISK SPECIFIKATION

Modell	FRT 4900	
Kapacitet	300 kg	300 kg
	100 g	200 g < 200 kg > 500 g
Viktenheter	kg/lb	kg (OIML-godkänd)
LCD-display	1,0 tum LCD-display, 5 siffror och 1 decimal	
Dimensioner	360 (L) X 520 (B) X 1020 (H) mm	
Knappfunktioner	UNIT , PRINT , ZERO , HOLD/BMI , TARE	
Strömkälla	6 st. 1.5V AA batterier / DC adapter 15V	
Drifts-temperatur	50° C / 35° C 0° C / 40° C (godkänt)	

DISPLAYSYMBOLER

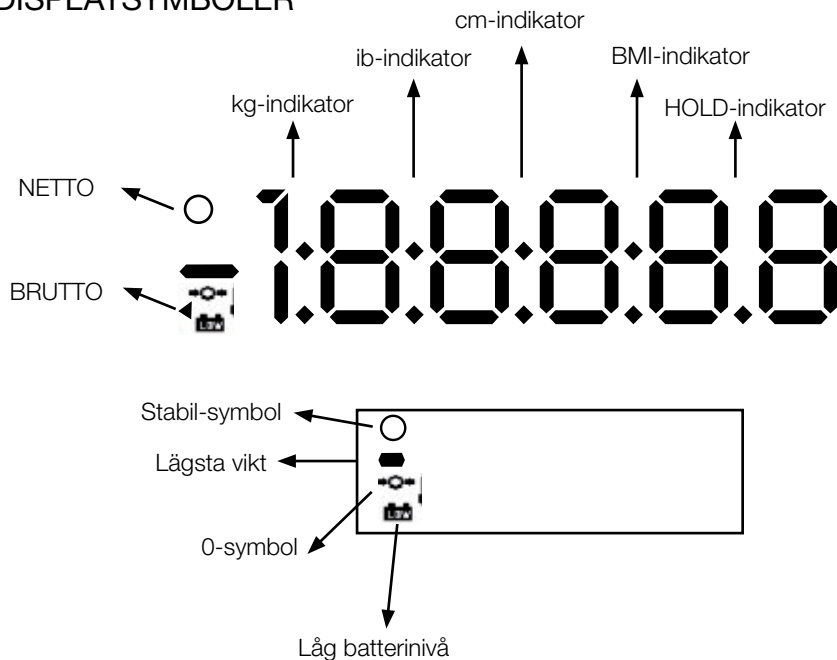

Beskrivning:


Stabil-symbol: Symbolen visas när stabil viktmätning uppnåtts.

Lägsta vikt: Vikt under 0

0-symbol: Vikt är 0.0 (nollställd)

Låg batterinivå: Batterierna behöver laddas eller bytas, anslut adaptorn i ett eluttag.

KNAPPFUNKTIONER

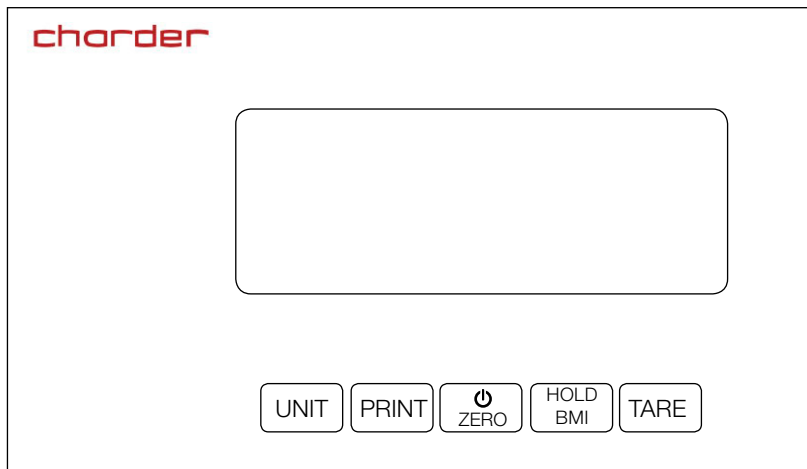

Beskrivning:

- **UNIT** Tryck på UNIT-knappen för att välja mellan kg eller lb (gäller ej för C3-våg).
- **PRINT** Tryck på PRINT-knappen för dataöverföring av vikt, längd och BMI för utskrift.
- **ON/OFF/ZERO** Tryck på ON/OFF/ZERO-knappen för att sätta på, stänga av eller nollställa vågen.
- **HOLD/BMI** Tryck på HOLD/BMI-knappen för att behålla visning av stabil vikt på displayen. Håll in knappen i 3 sek för att visa BMI.
- **TARE** Tryck på TARE-knappen för att spara vikt och komma tillbaka i nolläge.

BMI- och TARE-funktionerna beskrivs på sidan 8.

BMI- & TARE-FUNKTIONERNA

• BMI

Body Mass Index (BMI) är ett mått för att beräkna en persons kroppsfett utifrån längd och vikt, och gäller för både vuxna män och kvinnor.

BMI-kategorier:

- Undervikt = <18,5
- Normalvikt = 18,5–24,9
- Övervikt = 25–29,9
- Fetma = 30 eller högre

INSTRUKTIONER FÖR BMI-FUNKTIONEN

1. Tryck på ON/OFF/ZERO-knappen för att slå på vågen.
2. Stig upp på vågen när LCD-displayen visar 0.0 kg.
3. När vikten är stabil och stabil-symbolen visas på displayen håll in HOLD/BMI-knappen i 3 sek. Vågen kommer att visa senast inställd längd.
4. För att justera längd, tryck på TARE-knappen för att öka längd och på UNIT-knappen att minska längd. (Om vågen har digital längdmätning anslut MS 4900, mätresultatet vid mätning kommer att överföras automatiskt.)
5. Tryck på HOLD/BMI-knappen och displayen visar vikt och BMI samtidigt.
6. Tryck på HOLD/BMI-knappen igen för att återgå till startläget.

OBS! Vågen måste stå stabilt för att kunna läsa av vikt och beräkna BMI.

INSTRUKTIONER FÖR TARE-FUNKTIONEN

TARE-funktionen gör att man kan dra av eventuell extra vikt för att endast visa en persons totalvikt.


- Ex. om man lägger en gummimatta på vågen, visar vågen inte längre 0.0.
- Tryck på **[TARE]**-knappen för att spara gummimattans vikt, så att den vid vägning inte räknas samman med personens vikt.
- Placera personen på vågen.
- Nu visas personens vikt (gummimattans vikt är fråndragen).



OBS! Vågen kan endast memorera ett TARE-värde i taget.

När vågen inte är belastad visas värdet för den senaste inlästa TARE-vikten.

För att radera ett TARE-värdet, tryck på **[TARE]**-knappen när vågen inte är belastad.

LÅG BATTERINIVÅ & ADAPTERANSLUTNING

Om  visas på LCD-displayen, anslut adaptorn eller byt till nya batterier.

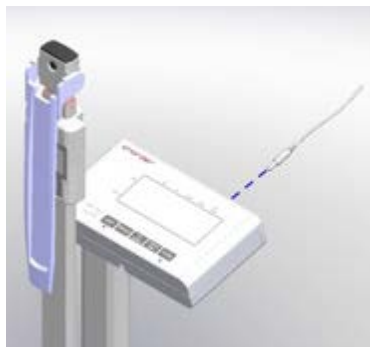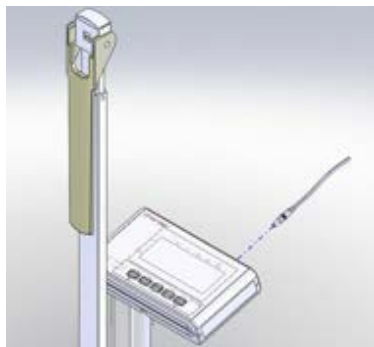


VARNING:

Anslut alltid adaptorn till vågen först och därefter i eluttaget.
Och tag alltid ur adaptorn från eluttaget först och sen ur vågen.


MONTERINGSINSTRUKTIONER

1. Montera ihop basplatta och pelare.
2. Anslut kabeln mellan pelaren och basplattan.
3. Montera fast pelaren på basplattans undersida med fyra skruvar.

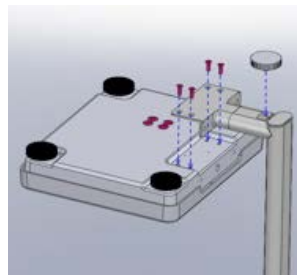


MONTERING AV FRT200M MANUELL LÄNGDMÄTARE

Montera fästet på pelaren med två skruvar

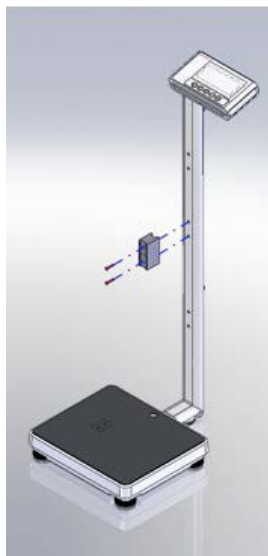


Montera FRT200M i fästet med en skruv

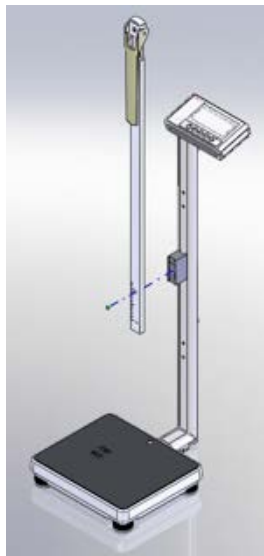


MONTERING AV FRT200D DIGITAL LÄNGDMÄTARE

Montera de två fästena på pelaren med fyra skruvar

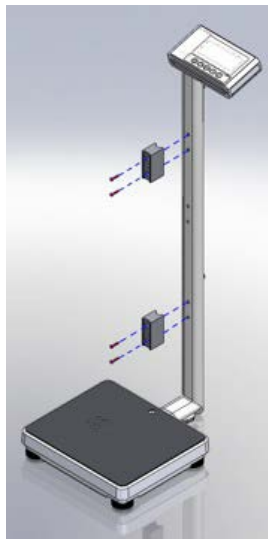

Montera FRT200D i de två fästena med 2 skruvar

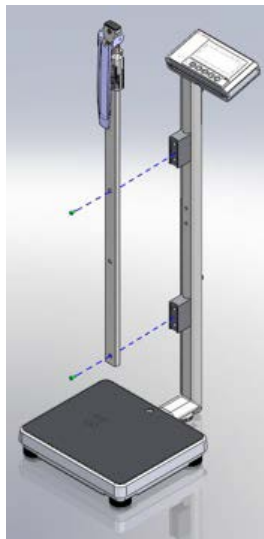

FELMEDDELANDEN

- **Låg batterinivå**

Varningsmeddelande för låg batterinivå.
Anslut adaptern till ett eluttag eller
byt till nya batterier.



- **Ofullständigt mätresultat (för låg vikt)**

Vikten är för låg för avläsning, försök igen
eller kontakta din lokala Gate Rehab
Development AB servicepartner.



- **Ofullständigt mätresultat (överbelastning)**

Vikten överstiger vågens maxgräns,
försök igen eller kontakta din lokala
Gate Rehab Development AB servicepartner.



- **EEPROM, felmeddelande**

Fel i vågens programvara.
Kontakta din lokala Gate Rehab
Development AB servicepartner.





Manufacturer's Declaration of Conformity

This product has been manufactured in accordance with the harmonized European standards, following the provisions of the below stated directives:

Electro Magnetic Compatibility Directive 2004/108/EC
Low Voltage Directive 2006/95/EC

only Medical Approval Scale is in conformity with
Medical Directive 93/42/EEC

FCC CLASS B Declaration of Conformity

This device complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules



DIN PARTNER I VÅRDEN

Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 0371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | S-330 21 Reftele
info@gaterd.se | www.gaterd.se



GATE COLLECTION