


Funke Medical AG
 Ährenfeld 10
 46348 Raesfeld
 Tel.: +49-2865-6648
 Fax: +49-2865-8133
 info@funke-medical.de
 www.funke-medical.de
 -GERMANY-

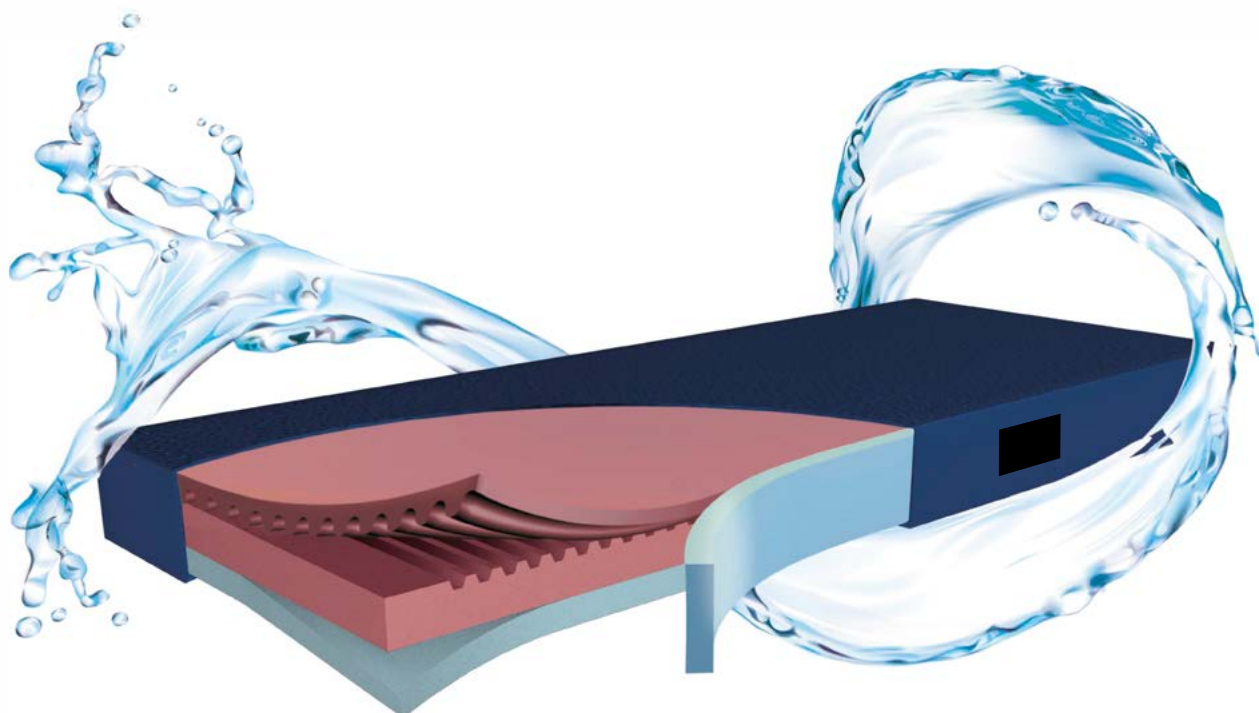

MAXX 250 Clinic

Bruksanvisning

Tryckavlastande skummadrass (upp till 250 kg)
 Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning av produkten.

PRS
 Pressure Relieving Solutions

Återförsäljare:



REHAB DEVELOPMENT AB

Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 0371-318 00
 Gate Rehab Development AB
 Industrigatan 2 | S-333 75 Reftele
 info@gaterd.se | www.gaterd.se

Produkt

Tryckavlastande skummadrass med blått PU-TEX överdrag med dragkedja och svetsade sömmar, bruksanvisning.

Användningsområde

Madrassen kan användas förebyggande och vid behandling av trycksår upp till och med sårkategori 2 samt vid smärterterapi.

Brukarvikt

0 – 250 kg

Teknisk data

Densitet: 50 kg/m³

Material i överdrag: Polyurethane + polyester

Vikt: ca 18-20 kg

Rengöring och underhåll

Torka av överdraget med desinfektionsmedel (DAX, Virkon, Perform eller liknande).

Vid behov tvätta överdraget i maskin.



Produkten är CE märkt enligt MDD 93/42/EEC, 2007/47/EEC.

Brandtest

Brandtest enligt SS8760001:2016

Biokompatibilitet

SS EN ISO 10993-5 ; SS EN ISO 10993-1

Instruktioner för användning och förvaring

Lägg madrassen direkt på sängbotten med trycket uppåt. Madrassen har ingen särskild huvud/fotända. Förvara madrassen plant i torrt och rent utrymme.

Säkerhetsanvisningar

Lämplig för sängar med justerbar liggyta.

Återvinning/Kassering

Madrasserna består till 100% av PU. Lämnas till återvinningsstation och sorteras som brännbart avfall.