

# Bruksanvisning



DIGITAL

# Bure<sup>TM</sup>

## Gåbord

**GATE**

REHAB DEVELOPMENT AB

Bure Ortho 56-317T  
Bure Space 56-304

## Kära Användare

Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du använder Bure Gåbord samt hur det underhålls.

Vi på GATE Rehab Development önskar dig lycka till med din produkt. Hör gärna av dig till oss om du har några kommentarer, frågor eller synpunkter.

Ring 0371 – 318 00.

### Höjning och sänkning av stativ

Önskad höjd justeras med hjälp av fjärrkontrollen Pil <UPP> resp. Pil <NED>



### Justering av handtag

Handtagen justeras till önskad position genom att: Ratt lossas, handtagen justeras, ratt låses.




### Höger- och vänsterjustering av armstödsplattor

För optimalt stöd kan armstödsplattorna justeras i sidled: Ratt lossas, armstödsplattans läge justeras, ratt låses.

OBS! Bakre fästen på stativ/armstöd kan bytas (höger mot vänster och tvärtom)

för att få en annan breddning. Styrpinnar på kudens undersida/bakkant kan också flyttas. Dessa inställningsmöjligheter ger möjlighet till en individuell anpassning.

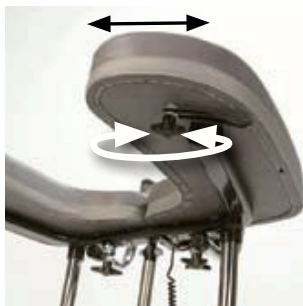

## Låsning av hjul

Hjulen låses genom att fotbromsen trycks nedåt och aktiveras.



## Upplåsning av hjul

Pressa ned den uppstickande delen av bromsen för att lossa bromsen.



## Kopplingschema styrbox



För att hantera kopplingar enligt nedanså måste styrboxens täcklock tas bort. Detta görs med hjälp av en skruvmejsel eller liknande - se särskild märkning på styrboxen.

1. Uttag för ställdon - höj/sänk. OBS! Var noga med att kontakter ansluts till rätt uttag eftersom detta annars kan skada ställdon.
2. Uttag för fjärrkontroll.
3. Uttag för batterikontakt.
4. Uttag för stickpropp (OBS! För att IP-klassning ska gälla så ska stickpropp ALLTID vara ansluten till styrbox).

## Laddning av batteri


- Stickpropp ansluts till 230V – vägguttag. Laddning påbörjas automatiskt och LED på batteriet blinkar grönt.
- Ladda batteriet i minst 8h.
- Om produkten ställs undan pga att den ej ska användas under en längre tid (mer än en vecka) så rekommenderar vi att batterikontakt lossas från styrboxen alternativt att batteriet stängs av med on/off knapp. På detta sätt elimineras risken att batteriet förstörs då styrboxen förbrukar en liten mängd ström även då bor det inte används.

## LED på styrbox och batteri

- Styrbox – lyser grönt då spänning finns från batteri/nätuttag.

- Batteri:

- Vid laddning lyser LED med blinkande grönt sken
- On/Off För att använda produkten - tryck på <ON>. Grön lampa börjar lysa/blinka. Med <OFF> knappen (håll in i 5s) kan man stänga av batteriet om produkten ej ska användas under en längre tid.
- Då batteriet är fulladdat så lyser LED med fast grönt sken.
- Då batteri är i normalläge/drift så blinkar LED med grönt sken med OREGELBUNDET intervall enligt - 0,5 sek tänd, 4 sek släckt.
- Då batteri behöver laddas (kvarvarande kapacitet <25%) blinkar LED med orange/rött sken med REGELBUNDET intervall enligt - 0,5 sek tänd, 4 sek släckt.

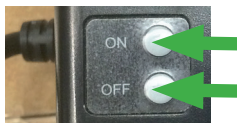

**OBS!** Batteriet har en inbyggd funktion som automatiskt stänger av batteriet då kvarvarande kapacitet <20%. LED är då släckt. Batteriet måste nu laddas fullt innan elektroniken på nytt kan användas.

# Underhåll

Rekommenderas minst 1 gång/år.

Kontrollera att/om	Åtgärd
<b>Allmänt</b> Bordet känns stumt/glappfritt. Bordet inte skramlar vid manövrering. Bordet är plant och alla hjul är i kontakt med underlaget. Bordet ej är smutsigt.	Rengör med ljum såpalösning/ alkolbaserat rengörningsmedel (ej petroleumprodukter)
<b>Armstödsplattor</b> Armstödsplattor är hela och rena. Breddning armstödsplattor fungerar.	Rengör och byt om skador finns. Komplettera ev. låsrattar/brickor
<b>Handtag</b> Grepp ej är skadade/smutsiga.	Rengör med ljum såpalösning (ej petroleumprodukter). Byt handtagsgrepp.
Handtagsinställning fungerar.	Komplettera ev. låsrattar/brickor
<b>Batteri</b> Kontrollera att laddkabel är ansluten till styrbox	Komplettera med ny laddkabel, denna ska alltid vara ansluten till styrbox (IP65klassning).
Kontrollera att fjärrkontrollen är ansluten till styrbox	Anslut ev. komplettera med ny fjärrkontroll.
Kontrollera att kopplingar är gjorda enligt kopplingschema	Se kopplingschema i Teknisk manual.
Kontrollera att batteri, ställdon och styrbox ej sitter/hänger löst.	Skruva åt, komplettera ev. med nya skruvförband.
<b>Höjjustering</b> Höjning och sänkning fungerar.	Byt ev. styrhylsa (i stativ) alt. ändpropp (i kromat rör).
Bordet känns stabilt vid maxinställning.	
Inget glapp finns mellan vertikalt stativ och bottenstativ.	Skruva åt låsskruvar
Klämmor för höjjustering låser.	Byt klämmor
Infästning av elställdon ska vara glappfri. Reglering av höjd med fjärrkontroll- fungerar. Elställdonet ska löpa mjukt och med konstant hastighet.	Skruva åt resp. infästningsförband, komplettera med skruv/låsmutter. Kontrollera så att batteri/fjärrkontroll/ ställdon är rätt kopplad enligt schema. Ladda batteriet. Kontakta kundtjänst.
<b>Stativdelar</b> Inga mekaniska skador finns.	Om skador finns - konsultera GATEs kundtjänst.
Inga skrapmärken finns. Ändskydd/bottenstaiv sitter på.	Komplettera med bättringsfärg. Komplettera med nya ändskydd.
Hjul/broms Hjul rullar lätt /slibanan ej är skadad	Rengör alt. byt hjul (OBS! hjulen låses alltid i bottenstativ med kemisk låsning alt låsmutter. Hjulen är kapslade och vi rekommenderar inte att de demonteras. Byt istället ut hela hjulpaketet.
Hjulen är hårt åtdragna i bottenstativ.	Skruva åt hjulbult - komplettera med låsmutter alt. Kemisk låsning (modellberoende)
Blockeringsbroms fungerar på alla hjul.	Byt hjulpaket.
Handbroms fungerar.	Justera broms alt komplettera med nya hjul.


## Generella skötselråd

- Torka av gåbord och armstödsplattor vid behov - använd tvållösning/alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.
- Produkten kan rengöras i tvättunnel eller motsvarande då elektronik är IP65-klassad. Dock, produkten är ej rostfri vilket gör att rengöring i maskin kan förkorta produktens livslängd.
- Byt ut trasiga delar omedelbart – skall göras av kunnig personal.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

## Tekniska specifikationer

Mått anges för bord med 125 mm hjul.

Bure Ortho	Bure Space
<b>Art. Nr.</b> 56-317T	<b>Art. Nr.</b> 56-304
<b>Bredd</b> 78 cm	<b>Bredd</b> 78 cm
<b>Max brukarvikt</b> 150 kg	<b>Max brukarvikt</b> 150 kg
<b>Längd</b> 80 cm	<b>Längd</b> 79 cm
<b>Höjd</b> 90-130 cm	<b>Höjd</b> 90-130 cm
<b>Armstöd/Innermått</b> 25-50 cm	<b>Armstöd/Innermått</b> 25-50 cm

 CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.  
Testad och godkänd enligt EN-11199-3/2005



Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 0371-318 00  
Gate Rehab Development AB  
Industrigatan 2 | S-330 21 Reftele  
info@gaterd.se | www.gaterd.se



GATE COLLECTION