

Kortinfo



Air ExpressTM

Tryckavlastning: Ersättningsmadrass
och Bäddmadrass

Återförsäljare i Sverige:
Gate Rehab Development AB, Isberga
Säteri, 333 91 Smålandsstenar
Tel: 0371-318 00

 GAYMAR®

GATE
REHAB DEVELOPMENT AB

Kontrollpanel

1. STRÖMOMKOPPLARE PÅ/AV på enhetens sida.
2. LYSANDE LÄGESVALOMKOPPLARE växlar mellan driftlägen (konstant lågtryck eller alternerade lågtryck).

– KONSTANT LÅGTRYCK 0000 – Alla celler i ersättningsmadrassen/bäddmadrassen fylls upp enhetligt när den här funktionen väljs. Lägesvalomkopplarens lampa är **SLÄCKT** när det här läget är aktiverat.

– ALTERNERANDE LÅGTRYCKSLÄGE 0000 – Intelligande celler i ersättningsmadrassen/bäddmadrassen fylls upp och töms växelvis i det här läget. Lägesvalomkopplarens lampa LYSER när det här läget är aktiverat.

3. KOMFORTVRED justeras för patientkomfort oberoende av vikt på patient eller läge i madrassen. Utgå från komforttratten i läge "normal", vredet längst åt höger. Anpassa vid behov komforten i madrassen genom att vrida komforttratten åt vänster till önskat läge. Under omvårdnad rekommenderas att komforttratten ställs i läge normal.

4. VARNINGSLAMPA FÖR TRYCKFÖRLUST ∞

5. STRÖMLAMPA (I)

6. LYSANDE LARMOMKOPPLARE aktiverar 🔔 eller inaktiverar 🔕 ljus- och ljudlarm.

– Om strömssladden kopplas bort med pumpen PÅ och larmomkopplaren aktiverad 🔔 ljuder ett larm med återkommande blinkningar. För att undvika ett oavsiktligt strömavbrottslarm ska enheten stängas av innan strömmen kopplas bort.

– Om det blir tryckförlust i ersättningsmadrassen/bäddmadrassen med pumpen PÅ och larmomkopplaren 🔔 aktiverad ljuder ett larm med återkommande blinkningar. Dessutom tänds lampan för tryckförlust. ∞

VAR FÖRSIKTIG!

Lämna alltid larmomkopplaren PÅ för att aktivera hörbart och synligt larm för tryck- och strömförlust.



Kontrollpanel

Installation


Bäddmadrass

1. Placera bäddmadrassen ovanpå befintlig sängmadrass med anslutningsslangar vid sängens fotända. Säkra bäddmadrassen genom att dra överdragets remmar runt sängmadrassens hörn.

Ersättningsmadrass

1. Placera ersättningsmadrassen på sängramen med anslutningsslangar vid sängens fotända.
2. Sätt fast ersättningsmadrassen i sängramen genom att föra nylonbanden på ersättningsmadrassen genom sängramen och sedan tillbaka genom D-ringarna på madrassen. Se till att grindarna fortfarande kan flyttas uppåt och nedåt utan problem.
3. Sänk sängramen till horisontell position och dra åt banden.
4. Lägg överdraget på ersättningsmadrassen. Fäst överdraget genom att föra kardborrebanden genom D-ringarna på madrassen och dra åt dem.


Pump/sängkläder/patient

1. Häng upp pumpen på sängens fotända med hjälp av krokarna på pumpens baksida. Pumpen kan även placeras på golvet i upprätt läge.
2. Anslut slangarna till pumpen. Ett klickljud bekräftar att de sitter fast.
3. Kontrollera att slangarna sitter fast ordentligt genom att försiktigt dra i dem. Se till att slangarna inte är böjda eller klämda.
4. Kontrollera att larmomkopplaren är aktiverad  innan pumpen startas. Aktivera lägesvalomkopplaren i antingen alternerande läge eller konstant lågtryck.
5. Slå på pumpen med **PÅ/AV** knappen. Ställ komfortvredet i läge "normal", vredet längst åt höger. Välj med lägesvalsomkopplaren alternerande lågtryck (växeltryck) eller konstant lågtryck (statiskt). Efter cirka 30 minuter är madrassen fylld. Vid behov, anpassa komforten i madrassen genom att vrida komfortratten åt vänster till önskat läge.
6. Lägg lakan och vid behov inkontinensskydd över ersättningsmadrassen/bäddmadrassen. Sängkläder bör ligga löst för att förhindra "hängmatte-effekt".
7. Placera patienten ovanpå ersättningsmadrassen/bäddmadrassen och se till att patienten ligger mitt i sängen.


Användarinstruktioner

Bäddmadrass

Alternerande lågtrycksläge


I alternerande lågtrycksläge kommer varje luftcell att växelvis öka och minska trycket var sjätte minut. Om du vill välja alternerande lågtryck ställer du lägesvalomkopplaren på pumpen till symbolen för alternerande lågtryck . Justera eventuellt luftmängden för patientkomfort med komfortvredet.

Konstant lågtrycksläge

Vid konstant lågtryck blir bäddmadrassen statisk, det vill säga lika mycket luft i varje cell. Om du vill välja konstant lågtryck ställer du lägesvalomkopplaren på pumpen mot symbolen konstant lågtryck . Justera eventuellt luftmängden för patientkomfort med komfortvredet.


Handkontroll av bäddmadrass

Utför handkontroll för att säkerställa att bäddmadrassens luftmängd är tillräcklig. Placera en hand med handflatan uppåt under bäddmadrassen, direkt under patientens bäckenregion. Om du inte kan känna patientens kropp genom bäddmadrassen behövs ingen justering. Om du kan känna patientens kropp genom bäddmadrassen öka luftmängden i bäddmadrassen med hjälp av komfortvredet. Vänta 10 minuter och gör en ny handkontroll. OBS! Om komfortvredet är i läge normal (längst till höger) och du fortfarande kan känna patientens kropp genom bäddmadrassen kontakta Gates kundtjänst på 0371-31800.

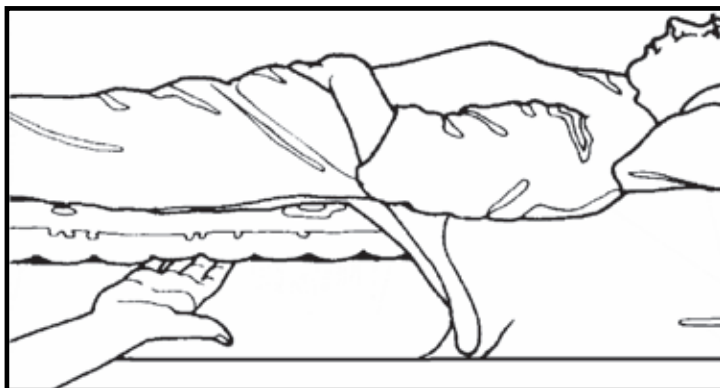


Ersättningsmadrass

Alternerande lågtrycksläge


I alternerande lågtrycksläge kommer varje luftcell att växelvis öka och minska trycket var sjätte minut. Om du vill välja alternerande lågtryck trycker du lägesvalomkopplaren på pumpen till symbolen för alternerande lågtryck  . Justera eventuellt luftmängden för patientkomfort med komfortvredet.

Konstant lågtrycksläge

Vid konstant lågtryck blir bäddmadrassen statisk, dvs. lika mycket luft i varje cell. Om du vill välja konstant lågtryck trycker du lägesvalomkopplaren på pumpen mot symbolen konstant lågtryck  . Justera eventuellt luftmängden för patientkomfort med komfortvredet.

Handkontroll av ersättningsmadrass

Utför handkontroll för att säkerställa att ersättningsmadrassens luftmängd är tillräcklig. Lossa madrassöverdragets mittband och lyft på överdraget för att få tillgång till luftcellerna. Sätt in handen vertikalt mellan luftcellerna direkt under patientens bäckenregion. Kontrollera att det finns ett avstånd på fyra fingrar mellan madrassbotten och patienten. Om mellanrummet är mindre öka luftmängden i ersättningsmadrassen med hjälp av komfortvredet. Vänta 10 minuter och gör en ny handkontroll. OBS! Om komfortvredet är i läge normal (längst till höger) och du fortfarande kan känna patientens kropp genom bäddmadrassen kontakta Gates kundtjänst på 0371-31800.

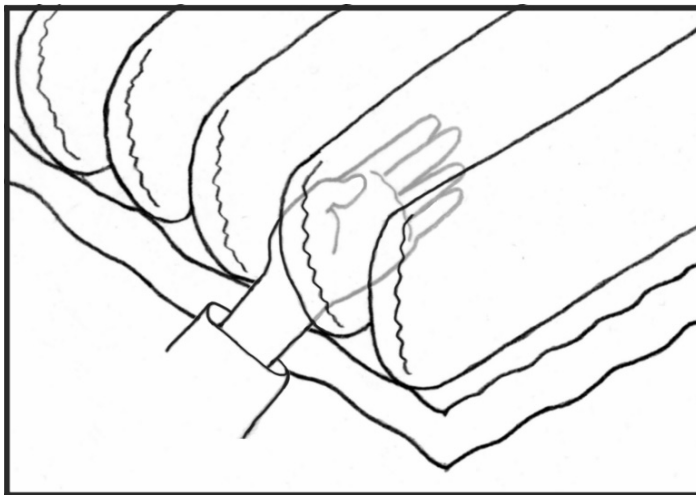

CPR/HLR Hjärt-lungräddning

Släpp ut luften ur ersättningsmadrassen/bäddmadrassen genom att lossa slangarna från pumpen. OBS! Ignorera CPR/HLR handtaget som finns på undersidan av bäddmadrassen eftersom detta kan ta tid att hitta när överdraget är stängt. Starta omedelbart CPR/HLR.

Transport av patient

Förbered 10 minuter innan transport.

1. Koppla om madrassen till konstant lågtryck genom att ställa lägesvalomkopplaren på pumpen mot symbolen konstant lågtryck ○○○○ .
2. Ställ komfortvredet i läge Normal cirka 10 minuter innan transporten av patienten påbörjas.
3. Inför transport, koppla loss slangarna från pumpen och koppla **SNABBT** ihop slangarnas hona och hane. Ersättningsmadrassen/bäddmadrassen är nu klar för transport.

Vi rekommenderar att denna funktion INTE används längre tid än nödvändigt. Beroende på patientvikt och på hur snabbt slangarna kopplas samman kan madrassen hålla luft i upp till 6 timmar.