



Artikelnummer 56-870-A1



Symmetric Air

Artikelnummer 56-870 / 56-871

Tryckavlastande ersättningsmadrass, självjusterande statisk luftmadrass med skumöverdel. Lämpar sig mycket väl inom sjukhus, sjukhem och hemsjukvårdsmiljöer. Produkten är självjusterande vilket innebär att det inte finns någon pump till och störande ljud och slangar elimineras.

- Statisk luftmadrass bestående av 9 st luftceller fördelade i 4 av varandra oberoende zoner med en överdel i skum.
 - Självjusterande madrass som anpassar trycket efter patientens vikt och rörelser.
 - Integrerad hälavlastning som reducerar trycket på hälarna.
 - Stretchöverdrag som ger extra skydd mot glidtryck.
 - Brukarvikt 0- 230 kg
- Madrassen är kliniskt dokumenterad t om sårkategori 3.

Mått: 200x 81/89 x 18 cm


Garantitid 3 år

CE märkt EN 60601-1
 EN 60601-1-2

Användarhandbok



1. Placera madrassen i sängramen med den markerade fotändan åt rätt håll.
2. Bädda sängen, fäst hörnstropparna vid madrassen enligt instruktionen.

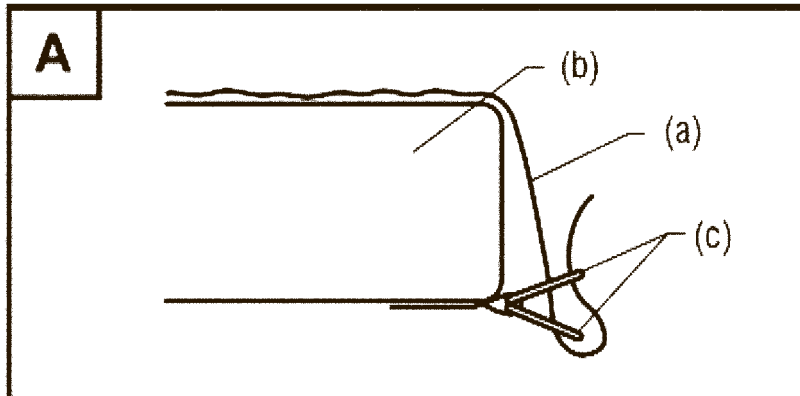

3. Sätt fast lakanen (a) på madrassen (b) genom att sticka de fyra hörnen i öglorna (c) som sitter fast på madrassen. Var noga med att lakanet ligger löst och inte är för sträckt för bästa behandling.
4. Placera patienten på madrassen.

RENGÖRNING/SKÖTSEL

Överdraget kan torkas av med desinfektionslösning, ljummet vatten och tvållösning eller ett mildt rengöringsmedel. Torka torrt innan bädden görs i ordning. Överdraget kan även maskintvättas vid behov i 75 °C och torktumlas. Använd tvättmedel eller sjukhusets desinfektionsmedel. Förvissa dig om att överdraget är helt torrt innan användning.



Leverantör:

GATE REHAB DEVELOPMENT AB
Isberga • 333 91 Smålandsstenar • Sweden
Tel 0371 318 00 • Fax 0371 318 01
Mail: info@gaterd.se • www.gaterd.se