




AmfibiTM

Hygienstol

GATE

www.gate.se

Amfibi XL 56-204

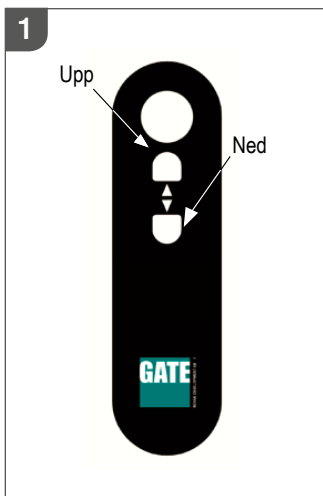

Höjning/Sänkning av sits


Höjning/Sänkning görs genom att använda fjärrkontroll (se bild1).



Manövrering kan ske med patient i stol - se till att ingen klämrisk föreligger.

Ljudsignaler under drift (varningssymbol/obs symbol);

- 3 korta summertoner innebär att batteriet måste laddas (stol kan bara köras nedåt).
- 1 kort summerton innebär att batteriet är tomt.

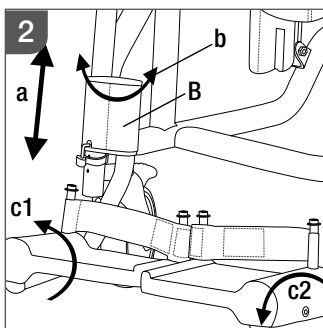


Fotstöd/Hälband

a) Fotstödet kan regleras i höjd genom att clips tas ur (se bild 2) och fotstöd flyttas till önskad höjd. Var noga med att återplacera clips (se bild 3).

b) Fotstödet kan svängas åt sidan genom att fatta fotstöd vid pil B – lyft uppåt/sväng.

c) Fotstödsplattan kan vridas upp (c1) och/eller vinklas (c2) enligt önskemål.

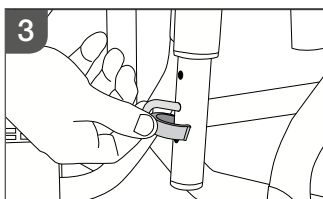

Säkerhet *Läs bruksanvisningen noga före användning.*



- Stå aldrig på Amfibi
- Patientansvarig/ordinatör bär ansvaret för att produkten är lämplig för dess användare.



Uppsamlingskärl

Uppsamlingskärl skjuts in bakifrån mellan sats och trådgejder enligt bild 4.

Var noga med att uppsamlingskärl skjuts ovanpå trådgejderna. Var även noga med att kärlet hamnar på rätt ställe i förhållande till uttag/sats.



Låsning av hjul

Amfibi XL är utrustad med tre låsningsbara/bromsade hjul (grå pedalbroms) samt ett riktningsspärrat hjul (grön pedalbroms). Bild 5 visar hur hjulets funktion aktiveras. Låsning med grå pedalknapp – rullning och svängning ej möjligt. Låsning med grön pedalknapp – hjulet rullar som vanligt men kan ej svängas.

Montering/Justering av ryggband

Fäst ryggbandet runt ryggstativet – lås fast med klick-spännen. Justera till önskat läge. Var noga med att uttag för armstöd passas mot uttaget i ryggbandet.

- Batteriskötsel - ta för vana att alltid ta ur batteriet ur kontrollbox och placera batteriet i laddaren då stolen ej används (gäller särskilt över natten eller om inte stolen ska användas på ett par dagar). Kontrollboxen förbrukar alltid en mindre mängd ström och batteriet riskerar därför att allvarigt skadas om det inte regelbundet laddas.
- Användarens personvikt får max vara 250 kg.
- Vid reglering av höjd - se till att inga kroppsdelar kan komma i kläm.



Montering av sits

Sitsen monteras enkelt via clips på undersidan som snäppas i sitsram. (se bild 6)



Körning av stol

Vi rekommenderar att körhandtaget används då stolen ska köras (med/ utan patient). Körhandtaget är utformat så att stolen på enklaste sätt och med minsta kraft ska kunna föras framåt/ svängas (se bild 7).



Armstöds- låsnings

Armstödet är låst i nedfällt läge. För att lyfta armstödet - drag ut sprint (1) och lyft armstödet (2).

- laktta försiktighet vid lutande mark och passage över trösklar eller liknande.
- Stå aldrig på FOTSTÖDEN - tipprisk föreligger!
- Laddning av batteri ska ALLTID göras i torrt utrymme - ej i våtrum eller liknande.
- Stolen får aldrig användas UTAN batteri då detta kan skada styrbox/elektronik.
- Stol får ALDRIG användas UNDER vatten (i bassäng eller liknande).

Kalibrering av systemet

Om strömmen bryts till kontrollbox under drift eller i direkt anslutning till drift (inom 5 sekunder efter det att stol har manövrerats) så kan man behöva göra en återställning/kalibrering av systemet. Detta för att ställdonens hallsensorer ska synkroniseras.

Kalibrering:

Tryck in fjärrkontrollens båda knappar UPP/NED – samtidigt i cirka 10 sekunder tills pipsignal hörs. Släpp knapparna. Tryck in NED-knappen och kör stolen till sitt minläge. Släpp knappen. Systemet kvitterar med en summersignal. Systemet kan nu användas som vanligt.



Insättning/ Uttag av batteri

Batteriet sitter normalt i styrboxen och hålls där på plats med magnetkraft. Uttag av batteri: Vrid batteriet 90 grader - ta ut. Insättning: För in batteriet i styrboxen (bild 9). Magnetkraft låser batteriet samt kvitterar att allt är OK med en pipsignal.



Varningssignal då batteriet sätts i;

- 2 långa summertoner innebär att kalibrering måste göras (se ovan)
- 5 korta summertoner innebär att batteriet måste laddas innan drift.

Laddning av batteriet

Batteri tas ur styrboxen och placeras i medföljande laddare. Laddaren ansluts till nät ("röd" lampa lyser-laddning sker). När batteri är färdigladdat lyser "grön" lampa. OBS! Laddning av batteri ska alltid göras i torrt utrymme. Stolen får EJ användas då batteriet är borttaget - vatten kan då tränga in i styrbox och skada denna.

Underhåll/Rengöring

Stolen är tillverkad av stålror (utvändig/invändig lackering) samt aluminium. Utsatta detaljer som ej har lackerats är gjorda av aluminium/rostfritt stål. Var noga med att kontrollera så att produkten känns stabil – inga lösa skruvförband får finnas. Skadade eller defekta delar bör bytas så snart det är möjligt.

- Stolen rengörs genom avtorkning med vanligt förekommande rengöringsmedel alternativt tvättmaskin/autoklav (max 85 grader).
- Ryggband torkas av med rengöringsmedel (ej uttorkande) alternativt tvättas i maskin 85 grader (se även instruktion på ryggbandet).
- Sits - kan tas bort och rengöras separat alternativt tvättas i maskin/autoklav (max 85 grader).

Underhåll - kontrollera - minst 1 gång/år

1. Armstöd - så att glidskydd/handlovsskydd är hela och sitter fast.
2. Elställdon/höj-sänk: Kontrollera funktion med fjärrkontroll samt att elställdonens infästningar ej glappar.
3. Sitsen/mjuksitsen - är hel och utan sprickor. Inga vassa kanter får finnas.
4. Fotstödsplattor - är hela och möjliga att justera på avsett sätt. Kontrollera att clips är hela och ordentligt fastsatta. Hälbanden ska finnas bakpå varje fotstödsplatta.
5. Hjul - ska ej rulla trögt eller sitta löst. Kontrollera också att broms fungerar.
6. Ryggbandet ska vara helt och ej har några hål eller andra skador på remmar/låsfästen



Garanti

Vi lämnar 2 års garanti på ev. fabrikationsfel (gäller ej förslitningsdetaljer).

 CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.



Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 0371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | S-330 21 Reftele
info@gaterd.se | www.gaterd.se



DIN PARTNER I VÅRDEN

GATE COLLECTION