

Tekniska specifikationer

Art. Nr.	Produkt	Brukarvikt
56-704	Sof*Care Suprême	0 - 300 kg (30 - 140 kg)
56-708	Sof*Care OPR lång (5 pack)	0 - 160 kg
56-709	Sof*Care OPR kort (5 pack)	0 - 160 kg
56-480	Sof*Care 427	0 - 300 kg
56-722	Clini-Dyne	0 - 160 kg
56-752	Air Express Overlay	0 - 230 kg
56-895	Air Express	0 - 230 kg
56-880	Aire Twin Overlay	0 - 260 kg
56-881	Aire Twin	0 - 260 kg
56-753	Auto Air Select	0 - 260 kg
56-754	Auto Sure Float	0 - 260 kg
56-748	Auto Air Select 105 cm	0 - 450 kg
56-749	Auto Air Select 120 cm	0 - 450 kg
56-746	Auto Sure Float 105 cm	0 - 450 kg
56-747	Auto Sure Float 120 cm	0 - 450 kg

Tillbehör

56-700	Sof*Care 840, madrasskärna
56-800	Sof*Care, överdrag
56-701	Sof*Care, fyllnadspump
56-702	Sof*Care, supportpump
56-481	Sof*Care, fyllnadspump manuell
56-879	Bottenmadrass till overlays (3 cm)
56-788	Bottenmadrass "Krubba" 90x200
56-789	Bottenmadrass "Krubba" 105x200
56-787	Bottenmadrass "Krubba" 120x200
56-706	Sof*Care hälsko
56-785	Clini-Dyne överdrag
56-790	ZIP fotstopp/hälavlastning
56-892	Överdrag Dartex/kvilt (AAS, ASF, AE)
56-793	Överdrag Nylon/kvilt (AAS, ASF, AE)
56-890	Överdrag Silver3/kvilt (AAS, ASF, AE)
56-794	Överdrag Air Express overlay
56-889	Överdrag Silver3 multi (overlays, skum)
56-795	Fyllnads/tömnings-pump (ASF, AE, AEO)
56-796	Plexus luftflås
56-798	Bag för madrasssystem
56-801	Bag för overlays

Hälavlastning



Hälskon avlastar vid sår, motverkar "droppfot" och skyddar känsliga fötter.



ZIP avlastningscell, för avlastning av hälar (eller andra kroppsdelar), samt för positioneringshjälp och skydd mot sängens gavlar.

Alla Gaymars tryckavlastningsmadrasser kan fås med överdrag belagda med äkta silver, **Silver3™** (Smith & Nephew). **Silver3™** har dokumenterat bakteriedödande egenskaper – det verkar inte bara nedbrytande på bakteriens cellväggar (som antibiotika gör) utan förstör också bakteriernas DNA, och stör delningsprocessen. **Silver3™** motverkar därmed smittspridning på ett mycket effektivt sätt vid behandling av patienter med bakteriella sjukdomar, till exempel MRSA och MSSA.

Gate Rehab Development AB

Vi är alla olika. Med olika drömmar och mål, glädjeämnen och sorger. Våra fysiska förutsättningar varierar också: i den bästa av världar samarbetar kroppen till hundra procent – ibland behöver den lite hjälp på traven. Livet öppnar alltid nya dörrar, och då vill vi finnas där. Med produkter som hjälper människan att ta vara på alla tillfällen till ett rikare, rörligare liv.

GATE är ett svenskt hjälpmedelsföretag, sprunget ur en lång skandinavisk tradition av rehabiliteringsforskning och produktutveckling. Säkerhet, pålitlighet, komfort och materialprestanda är en del av arvet men vi lever också efter en alldeles egen regel: att aldrig förhandla bort den individuella, ergonomiska passformen. Den är vår möjlighet att göra verklig skillnad. Skiljer sig gör också vår inställning till formgivning. Vi vill skapa produkter med ett egenvärde. Som är lätta att ta till sig och, kanske till och med, önska sig.

GATE fokuserar på gånghjälpmedel och lösningar för bad och hygien, samt ett urval av medicintekniska produkter inom området prevention och behandling av sår. Gemensamt för dem alla, är att de har det där lilla extra. En detalj, en lösning eller ett material som ingen annan har. Vi kallar det GATE Unique. Vårt företag grundades av personer med lång erfarenhet och vi drivs alla av vetskapen att vi – tillsammans med dig – kan förändra ett liv.

Stäng aldrig dörren för möjligheten.



GATE™ Rehab Development AB
Isberga Säteri
333 91 Smålandsstenar

Tel: 0371 31800
Fax: 0371 31801
E-mail: info@gaterd.se
Internet: www.gaterd.se


Madrasser

GATE

GAYMAR®

© 2007 GATE Rehab Development AB. All Rights Reserved. B&W Design

Norton skalan

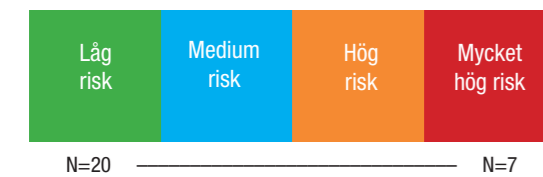

Använd Nortonskalan nedan för att utvärdera patientens allmäntillstånd. Inspektera huden för att hitta eventuella sår. Konsultera därefter tabellerna vid respektive madrass – Förebyggande, Sårgrad 1 eller Sårgrad 2, 3 och 4 – för rätt utgångspunkt vid val av madrass.

Med regelbundna kontroller kan du sätta in förebyggande åtgärder i rätt tid. Nortonskalan är en god hjälp för att bedöma risken att utveckla trycksår. 20 poäng eller mindre innebär höjd risk. Då krävs aktivt trycksårsförebyggande åtgärder och ökad omvårdnad.

	Psykisk status	Fysisk aktivitet	Rörelseförmåga	Födointag	Vätskeintag	Inkontinens	Allmäntillstånd
4	Helt orienterad i tid och rum	Går med eller utan hjälp	Fullgod	Normal portion	Mer än 1000 ml per dag	Nej	Gott
3	Stundtals förvirrad	Går med hjälp av personal	Något begränsad	3/4 portion	700 - 1000 ml per dag	Av och till	Ganska gott
2	Svarar ej adekvat på tilltal	Rullstolsburen	Mycket begränsad	1/2 portion	500 - 700 ml per dag	Urin- eller tarminkontinens	Dåligt
1	Okontaktbar	Sängliggande	Örörlig	Mindre än 1/2 portion	Mindre än 500 ml per dag	Urin- och tarminkontinens	Mycket dåligt

2009
www.gaterd.se

Det mest lättbehandlade trycksåret, är det som aldrig uppstår. Regelbundna kontroller och aktiv tryckavlastning besparar många människor onödigt lidande och begränsar vårdinsatserna. Madrasser från Gaymar ger lågt tryck, är lätta att hantera och anpassar sig alltid efter individen. Vård utan kompromisser.

GATE arbetar bara med produkter som har potentialen att göra verklig skillnad. Därför har vi valt att samarbeta med amerikanska Gaymar – världsledande i utvecklingen av innovativ tryckavlastning. Produkterna hör till toppskiktet vad gäller effekt och verkan, komfort och säkerhet. Samtliga produkter är väl dokumenterade. De har genomgått en omfattande klinisk prövning av såväl förebyggande som behandlande egenskaper, genomförda av oberoende läkare och forskare. Läs mer på www.gaymar.com



SofCare/ SofCare Suprême

- Kontinuerligt lågt tryck
- Påfyllnadspump eller ljudlös supportpump som automatiskt ställer in sig efter det individuella behovet
- Komfortinställning med supportpump
- Överdrag för minskat glidtryck (som standard på SofCare Suprême)
- Förenklar vid vändningar och härlavlastning

Som tillbehör finns även krubba (på bild ovan) för sängar med bredd 90, 105 och 120 cm



190 x 85 x 10

Ljudlös supportpump

Påfyllnadspump

Air Express Overlay

- Anatomisk design med varierad cellstorlek anpassad till kroppsformen
- Dynamiskt alternerande overlay
- Lågtrycksteknologi, LPT, som aldrig stänger av det kapillära flödet eller deformerar cellerna
- Pump med ljudlarm, som är ställbar även i statiskt läge
- Komfortinställning
- Överdrag för minskat glidtryck som standard
- Automatisk omfördelning av luft och luftmängd vid lägesändringar



200 x 86 x 10/13



Fjärilseffekten Tryckreducering

Madrasserna från Gaymar fokuserar på reduktion av tryck i alla dess former, enligt principen "ju lägre tryck desto bättre". Detta innebär att alla madrasser har ett konstant eller växlande lågt tryck för att motverka uppkomsten av trycksår. Särskiljer gör också den uttalade inriktningen på glidtryck. Glidtrycket gör, tillsammans med ett högt mekaniskt tryck, så att cellerna deformeras och slutligen förstörs. Därmed ökar risken för sår kraftigt. En perfekt anpassning av förhållandet mellan madrasser och överdrag kompenserar eventuell nedhasning, och gör att man inte blir "hängande i kostymen".

Air Express

- Dynamiskt madrasssystem
- Lågtrycksteknologi, LPT, som aldrig stänger av det kapillära flödet eller deformerar cellerna
- Pump med ljudlarm, som är ställbar även i statiskt läge
- Komfortinställning
- Luftcellsmaterial och kviltat överdrag som skyddar mot glidtryck
- Automatisk omfördelning av luft och luftmängd vid lägesändringar
- Kan kompletteras med Zip (Zero interface pressure) avlastningscell som låter hälar eller andra kroppsdelar sväva fritt. Zip kan användas som skydd mot sänggavlar och även motverka "droppfot"



200 x 83 x 25

Aire Twin Overlay

- Ljudlös pump med halvautomatisk inställning efter det individuella behovet
- Transportläge, ljudlarm och ställbar i statiskt läge
- Ventilation som till viss del hjälper till att hålla madrassen fri från fukt.
- Dynamiskt alternerande overlay
- Nylonöverdrag som till viss del minskar risk för glidtryck



203 x 86 x 12

Aire Twin

- Ljudlös pump med halvautomatisk inställning efter det individuella behovet
- Transportläge, ljudlarm och ställbar i statiskt läge
- Ventilation som till viss del hjälper till att hålla madrassen fri från fukt.
- Dynamiskt alternerande madrasssystem
- Nylonöverdrag med kvilt som minskar risk för glidtryck



203 x 86 x 20

Auto Surefloat



- Dynamiskt madrasssystem med "floating" funktion
- Sensorsystem med lågtrycksteknologi, LPT, som automatiskt läser av vikt, kroppsform och sängläge och anpassar lufttrycket till det lägsta möjliga
- Madrassen fås snabbt upp i maxtryck vid förflyttning och skötsel
- Luftcellsmaterial och kviltat överdrag som skyddar mot glidtryck
- Kan kompletteras med Zip (Zero interface pressure) avlastningscell som låter hälar eller andra kroppsdelar "sväva fritt". Zip kan användas som skydd mot sänggavlar och även motverka "droppfot"
- Finns i madrassbredder upp till 120 cm med brukarvikt 450 Kg



203 x 83 x 25

Auto Aire Select



- Dynamiskt "True Low Air Loss" system som reglerar hudens temperatur och effektivt håller den fri från fukt
- Anatomiskt system som anpassar trycket i fyra zoner
- Luftceller som alternerar dynamiskt med "floating" funktion
- Sensorsystem lågtrycksteknologi, LPT, som automatiskt läser av vikt, kroppsform och sängläge och anpassar lufttrycket till det lägsta möjliga
- Madrassen fås snabbt upp i maxtryck vid förflyttning och skötsel
- Luftcellsmaterial och kviltat överdrag som skyddar mot glidtryck
- Kan kompletteras med Zip (Zero interface pressure) avlastningscell som låter hälar eller andra kroppsdelar sväva fritt. Zip kan användas som skydd mot sänggavlar och även motverka "droppfot"
- Finns i madrassbredder upp till 120 cm med brukarvikt 450 Kg



203 x 83 x 25

Clini Dyne



- Ventilation som till viss del hjälper till att hålla madrassen fri från fukt.
- Automatisk vändning, individuellt ställbar i tid (15–60 minuter) och i vinkel (0–45°)
- Utmärkt som avlastning för personal och anhöriga vid behov av frekventa vändningar under natten.
- Särskilt lämpad vid vård av lungsjukdomar, cirkulationsproblem eller svårt funktionshindrade barn och vuxna



203 x 89 x 20