

Inget spill.
Exakt
dosering.

Tekniska specifikationer

CE CE märkt enligt MDD 93/42/EEC.

Art. Nr.	Produkt	Garanti
56-990	Pillerkrossare	Livstid
56-995	Engångspåsar (8 ml) 1000 st	



- Krossar och pulveriserar alla slags tabletter mycket effektivt.
- Engångspåsar som garanterar exakt och säker dosering.
- Snabbt enkelt och tyst! Inget spill - ingen rengöring - minimal kraftansträngning.
- Rostfri. Enkel att rengöra med desinfektionsmedel eller vatten. Livstids garanti.

O'Flynn Medical
Pillerkrossare

Krossar tabletterna snabbt och lätt

Så här går det till:



1. Lägg pillren i en av engångspåsarna (8ml).



2. Stäng till påsen och placera den på krossytan i pillerkrossaren.



3. Pressa med ett lätt tryck ned handtaget så krossas pillren.



4. Håll upp pulvret och servera patienten.



GATE COLLECTION

Vill du veta mer? Besök www.gaterd.se eller slå en signal till 0371-31800